

機械器具 56 採血又は輸血用器具  
管理医療機器 採血セット JMDNコード 10426000  
カワスミニバッグ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 採血した血液は人に輸血しないこと。[検査用採血器具である。]
2. 再使用禁止

\* 【形状・構造及び原理等】

＜各部の名称＞

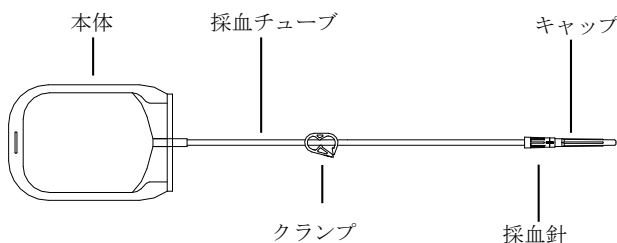

品番	規格
KBS-50A8iPS	最大採血量 50mL 18G 採血針 血液保存液

本品は、ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ2-エチルヘキシル）を使用しており、血液保存液（ACD-A液）が充填されている。

【使用目的又は効果】

本品はHLAなどの血液学的検査を行うための検査用血液を採取する医療機器である。

【使用方法等】

使用方法には種々の方法があり、以下はその一例である。

1. 使用期限内であることを確認の上、使用直前に本品が汚染されないよう包装から取り出す。
2. ミニバッグの採血チューブ途中のクランプを閉じる。

3. 被検者の上腕を駆血帯でしばり、静脈を怒張させて穿刺部位を決める。
4. 穿刺部位を中心に、皮膚消毒を行う。
5. 採血針のキャップを外して直ちに穿刺し、正しく静脈に入っていることを確認する。
6. 採血チューブ途中のクランプを開放して採血を開始する。
7. 採血中は血液と血液保存液がよく混ざるように、転倒混和しながら、目標の採血量まで採血する。
8. 採血が完了したらクランプを閉じ、採血針を静脈から抜去する。
9. 採血チューブのなるべく本体に近いところで、チューブシーラー等でシールして採血チューブを切り離す。
10. 検査を行うまで、適切な温度で保管する。
11. 検体を試験管等に分注する必要がある場合は、採血チューブを清潔なハサミなどで切断し、本体を加圧して検体を取り出す。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 包装開封後は直ちに使用すること。
2. 使用に際しては無菌的に取り扱うこと。
3. 遠心による破損には十分注意すること。
4. 採血針にキャップをつける際には、誤刺に注意し、慎重に行うこと。
5. 本品は可塑剤であるフタル酸ジ2-エチルヘキシルが溶出するおそれがある。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

水濡れに注意し、直射日光・紫外線・高温多湿を避けて、室温保存すること。

＜有効期間＞

有効期限は自己認証[当社データ]による。  
使用期限は外箱表示参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

\*\* 製造販売業者  
SB カワスミ株式会社  
電話番号：044-589-8070