

機械器具51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 単回使用汎用吸引チップ 35917102

フレーザー型手術用吸引具

再使用禁止

【警告】

1. 使用方法

- 1) 本品の先端を臓器・脈管に強く押し付けたり、擦り付けたり、引っ掻いたりしないこと。[臓器損傷の危険性がある。]
- 2) 操作中に吸引管に無理な力をかけないこと。[吸引管の湾曲部で破損し、臓器損傷の危険性がある。]

【禁忌・禁止】


1. 使用方法

再使用、再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 構造

1) 本体

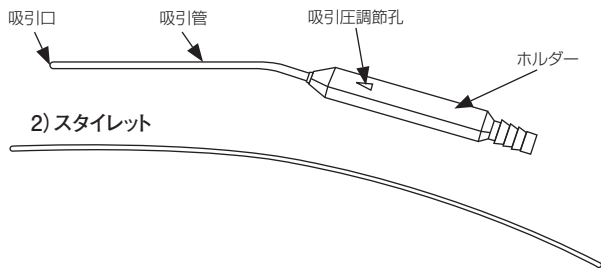

2) スタイレット

2. 種類

本品は構成内容により以下の種類がある。

製品番号	吸引管の外径 (mm)	吸引管の長さ (mm)
MD-15318	1.8	140
MD-15325	2.5	140
MD-15330	3	140
MD-15335	3.5	140
MD-15340	4	140

※ 本品はE O G滅菌済みである。

3. 材質

体液接触部	材質
吸引管	アルミニウム

4. 作動・動作原理

本品は吸引器に接続して、洗浄液、血液、粘液などを吸引するための吸引管である。ホルダーの吸引圧調節孔に対する指の押さえ具合により、吸引圧を調節することが可能である。

【使用目的又は効果】

本品は吸引器に接続し、外科手術等において、術野に貯留した洗浄液、血液や粘液などを吸引・排出するための器具である。

【使用方法等】

1. 本品の使用に際して必要に応じ以下のものを準備する。
 - ・本品（本体・スタイレット）
 - ・吸引器
 - ・コネクター付チューブ（MT-1701W、MT-1702W、MT-1703W、MT-1704W、MT-1711W、MT-1712W、MT-1713W、MT-1714Wなど）
2. 滅菌袋を開封して本品を取り出し、吸引管及びホルダーに傷、汚れ等の異常が無いことを確認する。
3. 本体からスタイレットを抜き取る。
4. コネクター付チューブの両端を吸引器とホルダーに確実に取り付けて接続する。
5. 吸引器を作動させ、ホルダーを持ち、吸引口から体内に挿入する。
6. ホルダーの吸引圧調節孔に対する指の押さえ具合により、吸引圧を調節しながら、洗浄液、血液、粘液などを吸引する。必要に応じて、吸引管を使いやすい角度に曲げてから使用してもよい。
7. 異物を吸引して詰まった場合は、直ちに吸引を止め、付属のスタイレットで異物を取り除くこと。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

1. 本体からスタイレットを抜き取らないまま吸引しないこと。吸引不良、臓器損傷の危険性がある。
2. 本品は吸引圧調節孔から指を離すとガスが漏れるため、気腹下での手術では使用できない。
3. 吸引口に臓器の一部が吸引された状態で無理に動かさないこと。臓器損傷の危険性がある。臓器の一部が吸引されて吸引口を塞いでしまった場合は、すみやかに吸引圧調節孔から指を離して吸引圧を下げ、ゆっくりと引き抜くこと。
4. 吸引操作前にコネクター付チューブの両端が、吸引器とホルダーに確実に接続されていることを確認すること。吸引不良、チューブ抜けの可能性がある。
5. 吸引操作前に吸引器の電源が入っていることを確認すること。
6. 吸引管に爪を立てて曲げたり、折れ目が入るまで曲げたり、またはいったん曲げた吸引管を同じ箇所でも逆方向に曲げ戻して使用しないこと。吸引管の内腔が潰れて吸引不良や吸引不能となる可能性や破損による臓器損傷の危険性がある。
7. 吸引管を曲げる際に、吸引管にあらかじめスタイレットを挿入しておくことと内腔の閉塞を防止できるが、曲げ過ぎるとスタイレット抜き不能や吸引管の折れ、潰れ、破損を生じる可能性がある。
8. 電気メスのメス先電極を吸引管に触れた状態で使用しないこと。吸引管は電気を通すため、スパーク発生や臓器損傷の危険性がある。
9. 脈管を引っ掛けた状態で無理に動かさないこと。脈管損傷の危険性がある。

【使用上の注意】

1. 不具合・有害事象

【重大な不具合】

- ・吸引管異常（傷、折れ、潰れ、破損）
- ・ホルダー異常（傷、折れ、破損）
- ・吸引不能
- ・吸引不良
- ・スタイレット抜き不能

【重大な有害事象】

- ・臓器損傷
- ・脈管損傷
- ・感染、発熱

【その他の不具合】

- ・気腹ガス漏れ
- ・チューブ抜け
- ・チューブ接続不能
- ・スパーク発生

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管条件

- 1) 本品は直射日光および水濡れを避け、涼しい場所で保管すること。
- 2) ケースに収納した状態で保管すること。

2. 有効期間

本品の滅菌保証期間は製造後3年間とする。(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

SBカワスミ株式会社

【お問い合わせ先電話番号】

東京	03-5462-4824	大阪	06-7659-2156
札幌	0133-60-2400	名古屋	052-726-8381
仙台	022-742-2471	広島	082-542-1381
北関東	0495-77-2621	福岡	092-624-0123