

機械器具 56 採血又は輸血用器具
管理医療機器 血液成分分離バッグ JMDNコード：70357000

血球洗浄バッグAC

再使用禁止

【警告】


低温及び凍結の状態での取り扱いには十分に注意すること。
[ポリ塩化ビニルは低温での物性が著しく低下し、破損する
場合がある。]

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

＜各部の名称＞

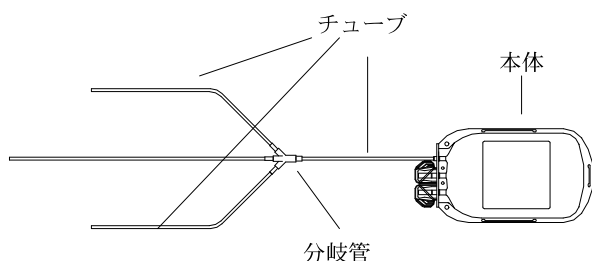

本品は、ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ2-エチルヘキシル）を使用している。

【使用目的又は効果】

本品は、血液及び血液成分を採取、分離、保存、処理、輸送又は投与するために使用するセットである。

【使用方法等】

使用方法には種々の方法があり、以下はその一例である。

1. 原料血、及び専用のチューブ付き生理食塩液を準備する。
2. 本品が使用期限内であることを確認の上、使用直前に汚染されないよう包装から取り出す。
3. 先端がシールされた3本のチューブのいずれかと準備した原料血のチューブを、無菌接続装置を用いて接続する。
4. 残りのチューブのいずれかと準備した専用の生理食塩液のチューブを、無菌接続装置を用いて接続する。
5. 定められた手順で洗浄人赤血球浮遊液の調製を行う。
6. 調整した洗浄人赤血球浮遊液に適した温度で保存する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 使用に際しては無菌的に取り扱うこと。
2. 遠心に使用の際には専用バケツ等にて実施し、遠心による破損には十分注意すること。
3. 本品は、可塑剤であるフタル酸ジ2-エチルヘキシルが溶出するおそれがあるので、注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

水濡れに注意し、直射日光・紫外線・高温多湿を避けて保存すること。

＜有効期間＞

有効期間は自己認証（当社データ）による。

使用期限は外箱表示参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＊ ＊ 製造販売業者

SBカワスミ株式会社

電話番号：044-589-8070