

SBバック スリム®

sumius

仕様

医療機器認証番号：21500BZY00419000




分野番号・分野名：029 吸引留置カテーテル
分類名：(1) 電動吸引型 (4) 創部用 ア軟質型 クラス分類II

製品番号	仕様	吸引器 (200mL)	シリコンウインドレナージチューブ (スーパースムーズ)		梱包単位	JAN コード	
			外径 (mm)	針の種類			
MD-53832N	セット品	○	○	3.5	10個/ケース	4545499058348	
MD-53852N		○	○	5		スタンダード針(二面針)	4545499058362
MD-53862N		○	○	6.5		ベンダブル針(三面針)	4545499058386
MD-53834N		○	○	3.5			4545499058355
MD-53854N		○	○	5			4545499058379
※MD-53800	単品	○	×	—	5個/ケース	4545499012579	

※印は受注生産品番です。
Yコネクタ付チューブ及びキャリングバッグ入りです。(MD-53800を除く)

[EOG滅菌済]

構成部品

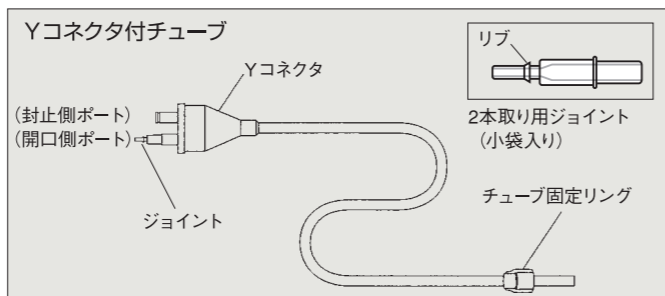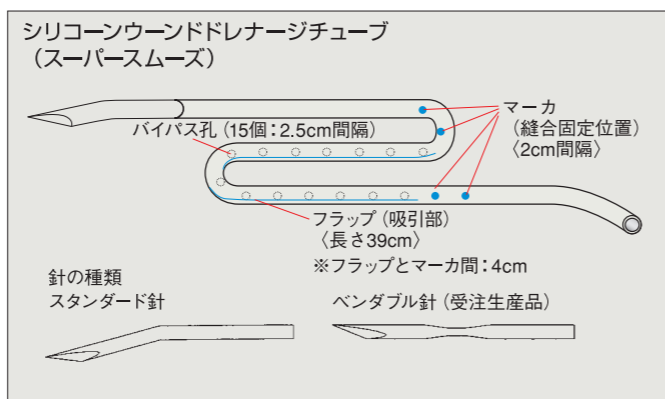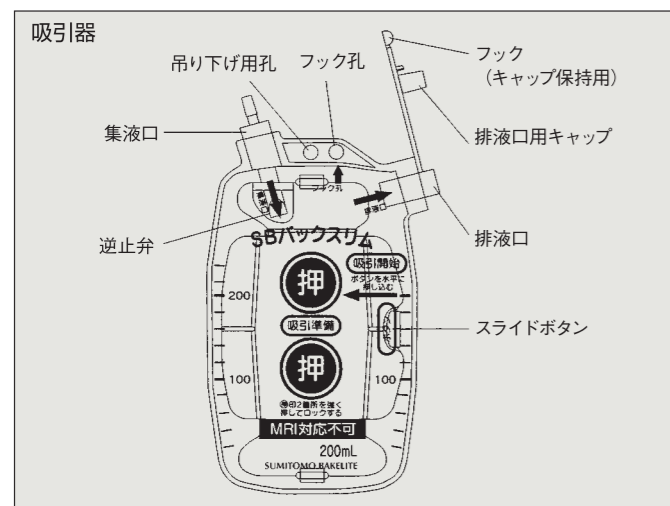

お願い

- ・本製品は、本製品の目的用途以外の用途には使用しないでください。
- ・本製品は、本製品の使用に熟練した医師又は、その管理下でご使用ください。
- ・本製品の使用に際しては、電子添文をご確認の上ご使用ください。
- ・本製品は、1回限りの使用で使い捨て、再度の使用はさせていただきます。
- ・本製品の製品ラベルにより、製品のサイズ、有効期限を確認してください。
- ・有効期限切れのものは使用しないでください。
- ・本製品の包装に破損、水濡れがあるものは汚染されている危険性がありますので、使用しないでください。
- ・本製品は直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。
- ・本製品に関して不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

※製品の規格・外観・その他を改良するために予告なく変更することがあります。

製造販売業者

SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号

【お問い合わせ先電話番号】 東京 ☎03(5462)4824 大阪 ☎06(7659)2156
札幌 ☎0133(60)2400 名古屋 ☎052(726)8381
仙台 ☎022(742)2471 広島 ☎082(542)1381
北関東 ☎0495(77)2621 福岡 ☎092(624)0123

取扱店

sumiusは住友ベークライト株式会社の登録商標です
2022.3.0 P:AD538:JA:2:O:1407

SB-KAWASUMI

sumius

SBバック スリム® PAT.

低圧持続吸引器



SB VAC SLIM

SB-KAWASUMI LABORATORIES, INC.

手術・ドレナージ

SBバック スリム® 〈特長〉


シリコンウインドレナージチューブ (スーパースムーズ)

■スムーズな抜去性能

フラップ機構の採用により、組織がチューブ内に侵入しにくく、また、侵入した場合でも抜けやすい構造のため、チューブ抜去時の抵抗が少なくなります。


■つまりにくいチューブ構造

独自のフラップ機構に加え、大口径の2ルーメンの採用、さらにそのルーメンの隔壁にバイパス孔を設けたため、チューブ閉塞が起こりにくい構造となっています。

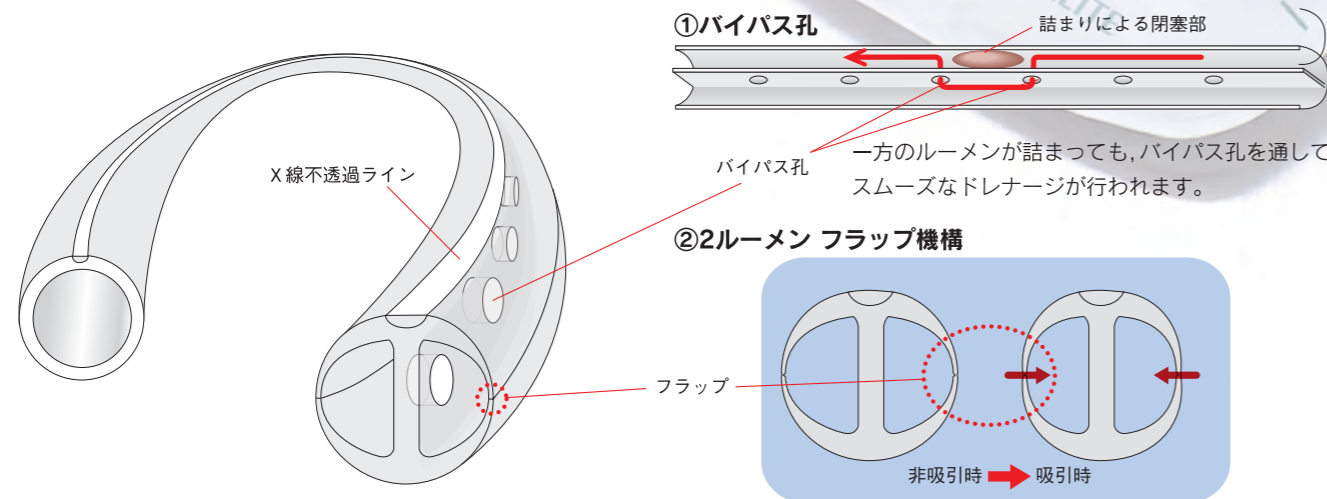


■経済的な二本取り

左右対称構造により、中央で切断して2本のチューブとしても使用が可能です。
組織に対して刺激の少ないシリコンゴム製です。

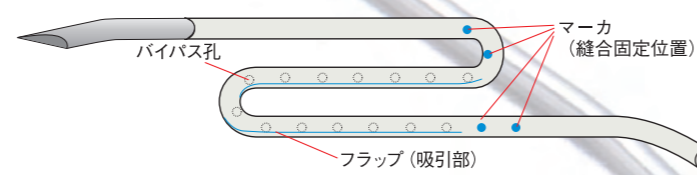


■選べる穿刺用針

ドレナージチューブの針先を自由に曲げることのできるペンダブル針も用意しております。

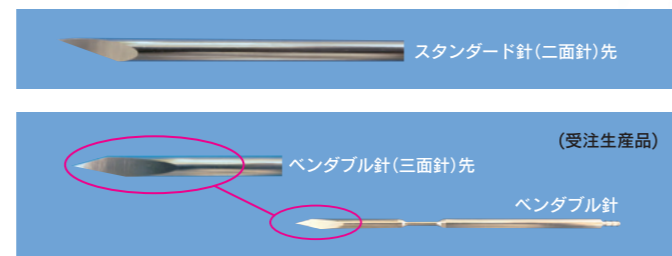

■吸引器

吸引器は小型軽量で持ち運びに便利です。(キャリングバッグ付)
吸引操作が簡単で、安定した吸引力を確保しています。

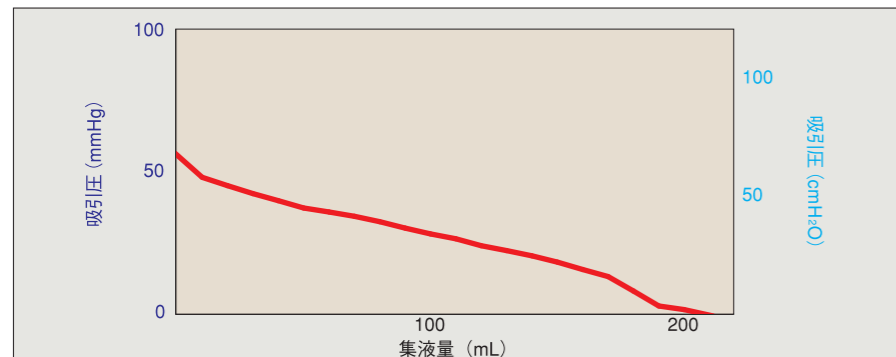

吸引曲線 (吸引圧力の一例)



携帯に便利なキャリングバッグ

SBバック スリム® 〈使用方法〉

吸引器

・操作方法

吸引前

要確認
排水口を排水口用キャップで閉じます。

吸引開始

真横にまっすぐ押す
本体をしっかり持ち、黄色いスライドボタンを水平に押します。

吸引中

(吸引器裏面)
くぼみの影が浮き出てくる
陰圧の発生は、本体表面のくぼみで確認できます。

排液の廃棄

逆止弁
排液に注意
キャップを左右にねじって締めてから開けます。キャップのフックを上部の孔に掛け本体を傾けます。「押」印2カ所を同時に押し絞るように排出します。

再セット

要確認
排液口のキャップが開いていることを確認し「押」印2カ所を同時に「カチッ」と音がするまで押します。

※ご使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

Yコネクタ付チューブ

・本体との固定方法



・スーパースムーズとの接続方法

