

SBバックミニ



柔軟なシリコンドレインチューブ（ラウンド）にシリコン製ボトルをセット



ドレインチューブ断面

特長

- スリットルーメンと先端開口ルーメンの両方からのドレナージが可能です。
- 先端開口ルーメンを通じてドレーン先端部までガイドワイヤを誘導することにより、ドレーン交換をサポートします。

ガイドワイヤ挿入方法




ガイドワイヤ挿入用カットラインでドレーンを切断



先端開口ルーメン
白い不透過ラインのあるルーメンにガイドワイヤを挿入
ドレーン先端までガイドワイヤを誘導します

仕様

ドレーン断面図

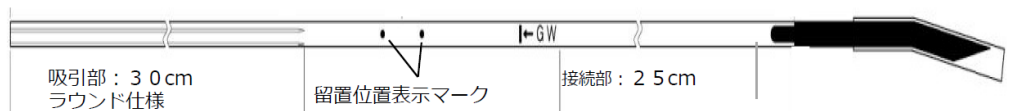

医療機器認証番号：228AFBZX00111000（クラス分類II）

分野番号・分野名：0 2 9 吸引留置カテーテル
分類名：（1）能動吸引型 ④ 創部用 ア 軟質型

製品番号	タイプ	仕様	吸引部 (mm)	接続部外径 (mm)	容量 (mL)	梱包単位	JANコード
MD-55165	ラウンド※	ラウンドドレナージチューブ（針付）	外径 5	5	100	10個 / ケース	4545499065049
MD-55166		排液ボトル（100mL）	外径 6.5	6.5			4545499065056

※ 交換用ガイドワイヤ 外径0.035inch以下 長さ1.2m以上を使用ください。

【EOG滅菌済】

お願い

- ・本製品は、本製品の目的用途以外の用途には使用しないでください。
- ・本製品は、本製品の使用に熟練した医師、又はその管理下でご使用ください。
- ・本製品の使用に際しては、電子添文をご確認の上ご使用ください。
- ・本製品は1回限りの使用で使い捨て、再度の使用はさけてください。
- ・本製品の製品ラベルにより、製品のサイズ、有効期限を確認してください。有効期限切れのものは使用しないでください。
- ・本製品の梱包に、破損、水濡れがあるものは汚染されている危険性がありますので、使用しないでください。
- ・本製品は直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。
- ・本製品に関して不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

※製品の規格・外観・その他を改良するために予告なく変更することがあります。

【製造販売業者】

SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号

【お問い合わせ先電話番号】

東京 ☎03-5462-4824

大阪 ☎06-7659-2156

札幌 ☎0133-60-2400

名古屋 ☎052-726-8381

仙台 ☎022-742-2471

広島 ☎082-542-1381

北関東 ☎0495-77-2621

福岡 ☎092-624-0123