

クリオドレーンバック[®] クリオドレーンバック[®] クローバーシステム

腹腔用低圧持続ドレナージシステム

PAT.



CLIO DRAIN VAC[®]
series

販売名：クリオドレーンバック

販売名：クリオドレーンバック クローバーシステム

医療機器認証番号：222AABZX00089000


医療機器認証番号：226AFBZX00144000

クリオドレーンバック®/クリオドレーンバック®クローバーシステム

腹腔への刺激に配慮した低圧・定圧吸引を追求

ドレナージシステム全体の視認性を高めて、体内情報の変化をいち早くキャッチできます。

プリーツドレーンチューブ(クリオドレーンバック®)

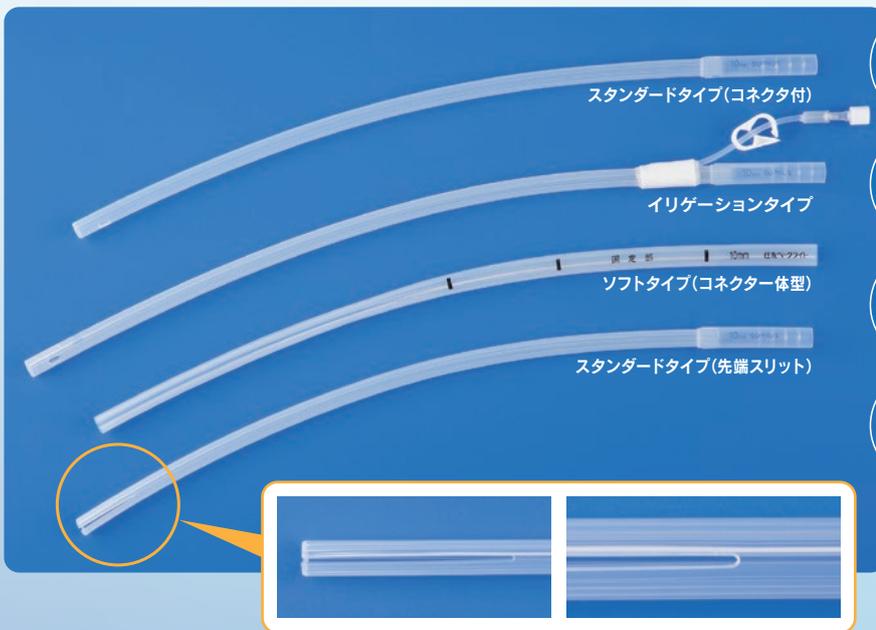

生食、洗浄液などを簡単に注入できるサイドルーメンを設けており、膿瘍の持続洗浄などが容易にできます。




ソフトタイプの先端は肉薄でスタンダードタイプに比べ非常に柔軟です。



側孔タイプではないのでネットなどを巻き込んでも抜去することができます。



内腔はプリーツ(ヒダ)付きで、チューブ効果と毛細管効果を併せ持つ構造です。適度なコシと柔軟さを兼ね備え、用途に応じて4種類を選択できます。

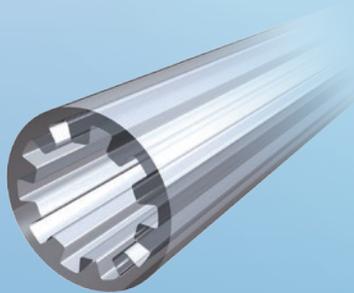

ニードルレス検体採取ポート

コネクティングチューブにサンプリングポートを設けました。



クローバードレーンチューブ(ラウンド・フラット) (クリオドレーンバック® クローバーシステム)

4つのスリット(外溝)ルーメンと1つの先端開口ルーメンの両方からドレナージ可能です。先端開口ルーメンからガイドワイヤーによるドレナージ交換をサポートします。



【ガイドワイヤ挿入方法】



① [GW] カットラインでドレナージを切断。



先端開口ルーメン



② ガイドワイヤを白い不透過ラインのあるルーメンに挿入、ドレナージ先端まで誘導します。

吸引操作が簡単

ゴム球をプッシュします。



陰圧解除ポート


ゴム球内の陰圧を解除できます。



陰圧解除ポートのつまみを強く摘まみます。

吊り下げ紐掛け用フック

フックを利用することによってゴム球頭頂部が支えられ、ゴム球が前に傾くのを防止することができます。

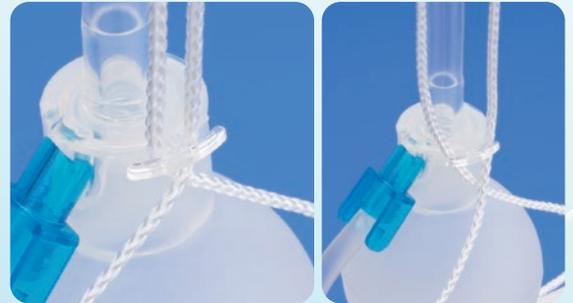

経路内腔の広い逆流防止弁

弁は内腔を広く設計し、詰まり防止に配慮しています。

撥水性の通気フィルタ


排液に混じって出てくる気泡を効率よく排出します。

排液口

広くて排出しやすい設計です。

吸引圧と集液量の関係


腹腔内において、従来の持続吸引器に比べ緩い安定的な低圧吸引を追求しました。

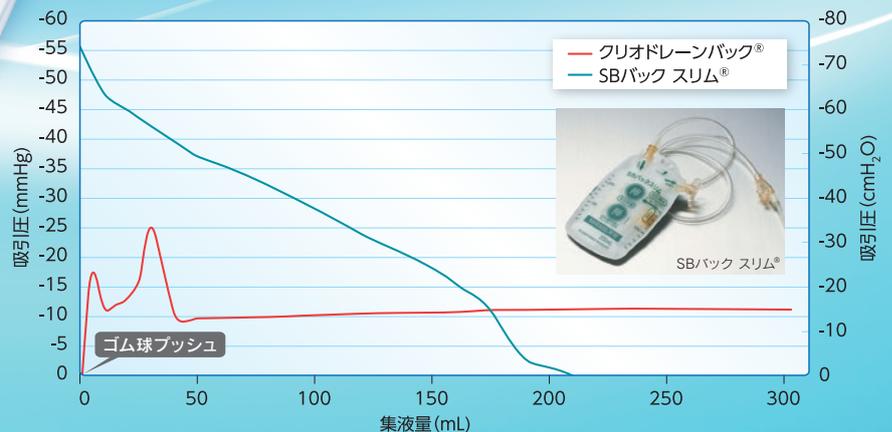


※留置部位から吸引バックを約20cm下ろした場合

クリオドレーンバック®


スタンダードタイプ (コネクタ付)

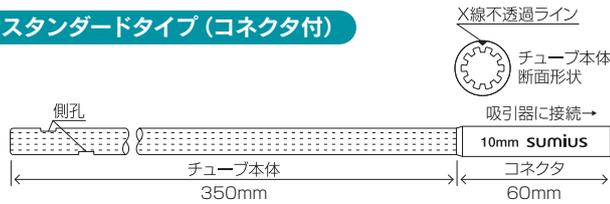

ソフトタイプ (コネクター体型)

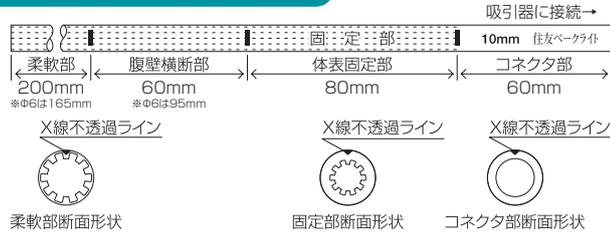

イリゲーションタイプ

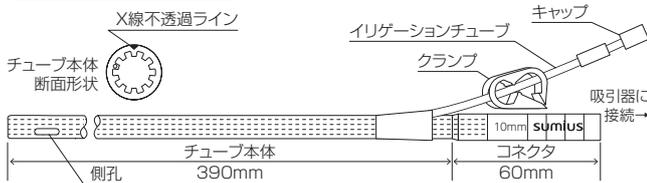

スタンダードタイプ (先端スリット)



クリオドレーンバック

製品番号	ブリードレーンチューブ		吸引器容量 (mL)	梱包単位	JANコード
	タイプ	外径 (mm)			
MD-43606	スタンダードタイプ (コネクタ付)	6	300	10個/ケース	4545499057761
MD-43608		8			4545499057136
MD-43610		10			4545499057143
MD-43646	ソフトタイプ (コネクター体型)	6	300	10個/ケース	4545499057792
MD-43648		8			4545499057150
MD-43650		10			4545499057167
MD-43628	イリゲーションタイプ	8	800	10個/ケース	4545499057778
MD-43630		10			4545499057785
MD-43606S	スタンダードタイプ (先端スリット)	6	300	10個/ケース	4545499059307
MD-43608S		8			4545499059314
MD-43610S		10			4545499059321

医療機器認証番号：222AABZX00089000


【EOG 滅菌済】

分野番号・分野名：029 吸引留置カテーテル

分類名：(1) 能動吸引型④創部用 ア 軟質型 クラス分類II

【用途】

腹腔内、後腹膜腔の膿、滲出液、血液、胆汁、尿液、膿瘍などのドレナージ
骨盤腔、ダグラス窩内のドレナージ
(消化器領域、肝胆膵領域、腎・泌尿器領域、産婦人科領域などにご使用いただけます)

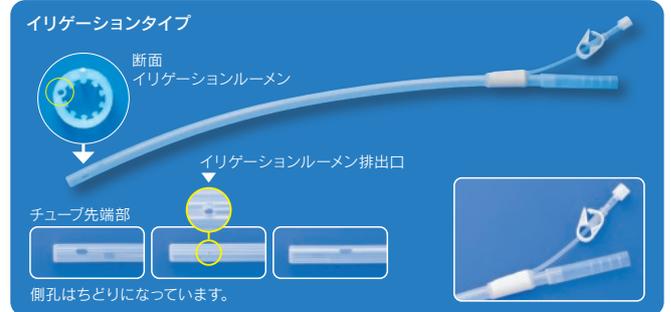

クリオドレーンバック® クローバーシステム

ラウンドタイプ



フラットタイプ



クリオドレーンバック クローバーシステム

製品番号	タイプ	ラウンド部外径 (mm)	幅 (mm)	容量 (mL)	梱包単位	JANコード
MD-43705	ラウンド	5	—	300	10個/ケース	4545499060990
MD-43706		6.5	—			4545499061003
MD-43707	フラット	5	7	300	10個/ケース	4545499062888
MD-43701		6.5	10			4545499062871

医療機器認証番号：226AFBZX00144000

【EOG 滅菌済】

分野番号・分野名：029 吸引留置カテーテル

分類名：(1) 能動吸引型④創部用 ア 軟質型 クラス分類II

【用途】

腹腔内、後腹膜腔の膿、滲出液、血液、胆汁、尿液、膿瘍などのドレナージ
骨盤腔、ダグラス窩内のドレナージ
(消化器領域、肝胆膵領域、腎・泌尿器領域、産婦人科領域などにご使用いただけます)

- ・ お願い
- ・ 本製品は本製品の目的用途以外の用途には使用しないでください。
- ・ 本製品は本製品の使用に熟練した医師、またはその管理下でご使用ください。
- ・ 本製品の使用に際しては、添付文書をご確認の上で使用ください。
- ・ 本製品の製品ラベルにより、有効期限を確認してください。
- ・ 有効期限切れのものは使用しないでください。

- ・ 本製品は1回限りの使用で使い捨て、再度の使用は避けてください。
- ・ 本製品の包装に破損、水濡れがあるものは汚染されている危険性がありますので、使用しないでください。
- ・ 本製品は直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。
- ・ 本製品に関して不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

※製品の規格・外観・その他を改良するために、予告なく仕様を変更することがあります。

【製造販売業者】

SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号

【お問い合わせ先電話番号】

東京 ☎03-5462-4824

札幌 ☎0133-60-2400

仙台 ☎022-742-2471

北関東 ☎0495-77-2621

大阪 ☎06-7659-2156

名古屋 ☎052-726-8381

広島 ☎082-542-1381

福岡 ☎092-624-0123