

ダイレクトCSカニューレ

レトロ灌流時に左右の冠動脈域への送液のため
CSへのタバコ縫合固定用の
円盤状アンカーを備えたカニューレです




特長

- 先端部のアンカーをタバコ縫合でコロナリーサインス (CS) に固定する仕様のレトロカニューレです。
- 右領域冠静脈 (PIV等) の閉塞防止のため、コンパクトなアンカーにしました。
- カテーテルチューブは柔軟なウレタン樹脂製です。

(ポイント)


CS開口部にタバコ縫合して本品を固定する際は、冠静脈に2cmほど挿入したサクシオンに沿わせてカニューレを挿入してください。

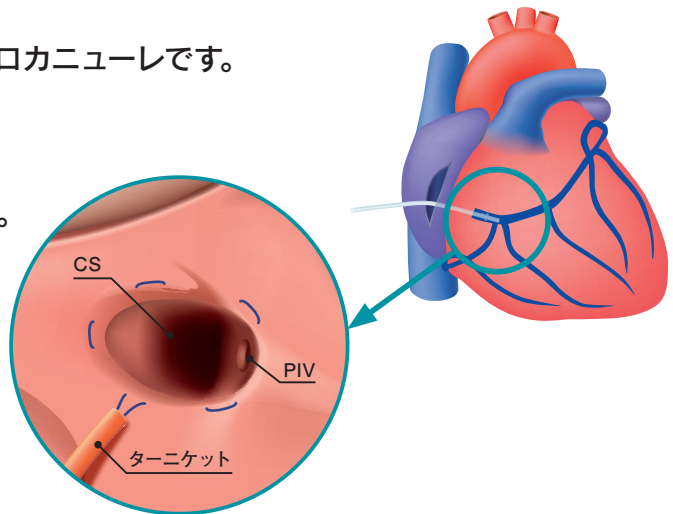


CS開口部へのタバコ縫合

PIV; posterior ivtraventricular vein (後室間静脈)


仕様

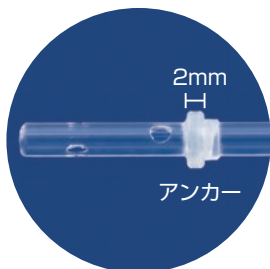

アンカー

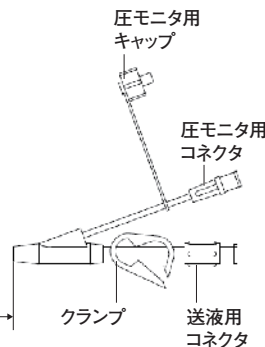

送液特性

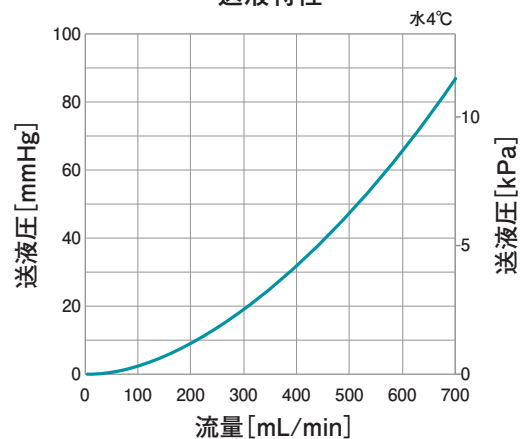

販売名: ダイレクトCSカニューレ

医療機器承認番号: 23100BZX00105000

分野番号・分野名: 126 体外循環用カニューレ

分類名: (2) 成人用・心筋保護用カニューレ③レトロ

製品番号	カテーテル外径 (mm (Fr))	アンカー外径 (mm)	カテーテル有効長 (mm)	梱包単位	JANコード
MD-25412	4.0 (12)	6.5	300	2本/ケース	4545499070081

EOG 滅菌済

お願い

- ・本製品は本製品の目的用途以外の用途には使用しないでください。
- ・本製品は本製品の使用に熟練した医師、またはその管理下でご使用ください。
- ・本製品の使用に際しては、電子添文をご確認の上ご使用ください。
- ・本製品の製品ラベルにより、有効期限を確認してください。
- 有効期限切れのものは使用しないでください。

- ・本製品は1回限りの使用で使い捨て、再度の使用は避けてください。
- ・本製品の包装に破損、水濡れがあるものは汚染されている危険性がありますので、使用しないでください。
- ・本製品は直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。
- ・本製品に関して不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

※製品の規格・外観・その他を改良するために、予告なく仕様を変更することがあります。

【製造販売業者】

SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号

【お問い合わせ先電話番号】

東京 ☎03-5462-4824

大阪 ☎06-7659-2156

札幌 ☎0133-60-2400

名古屋 ☎052-726-8381

仙台 ☎022-742-2471

広島 ☎082-542-1381

北関東 ☎0495-77-2621

福岡 ☎092-624-0123