


# 気管吸引キット シリーズ

販売名 気管吸引用キット  
 気管吸引用キットカテーテル付  
 気管支肺胞洗浄用吸引キット

気管支、気管、口腔内の分泌液を  
 無菌的に採取し検査するためのキットです



共通附属品

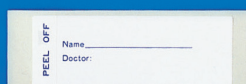

※キャップはそれぞれ専用  
 サイズで用意しています

## 気管吸引用キット シリーズ

### 特長

- 喀痰採取用の各種カテーテルと接続できるようにオスコネクターが附属しています
- 病棟患者の喀痰採取時には、吸引カテーテル付の製品が便利です
- 容量は、10mL、15mL、50mL、150mLと目的に応じて使い分けができます
- 各種の気管支用スコープに合うように接続端がルアータイプも用意しています(10mLタイプ)

\*オスルアーコネクター



### 気管吸引キット

製品番号	還沈管		接続部		梱包単位	JANコード
	容量	寸法(内径×長さ)(mm)	ポンプ側	吸引口側		
MD-33030	10mL	16×103	オスコネクター	内径6.1mmテーパーチューブ	50本/ケース	4545499001597
MD-33040	10mL	16×103	内径3.4mmストレートチューブ	*オスルアーコネクター		4545499001603
MD-33015	15mL	17×117	オスコネクター	内径6.1mmテーパーチューブ		4545499001580
MD-33050	50mL	30×114	オスコネクター	内径6.1mmテーパーチューブ		4545499001627

付属品：スベアキャップ、予備コネクター、ネーミング用ラベル

【EOG滅菌済】



### 気管吸引キットカテーテル付

医療機器認証番号：15800BZZ00109000

製品番号	還沈管		ポンプ側	カラーコード	接続部		梱包単位	JANコード
	容量	寸法(内径×長さ)(mm)			吸引口側	吸引口側		
MD-33105	10mL	16×103	吸引圧調節口付 オスコネクター	灰色	吸引カテーテル1.67mm(5Fr)×40cm側孔:1孔	40本/ケース	4545499001641	
MD-33106				薄緑色	吸引カテーテル2.00mm(6Fr)×40cm側孔:1孔		4545499001658	
MD-33110				黒	吸引カテーテル3.33mm(10Fr)×50cm側孔:2孔		4545499001665	
MD-33112				白	吸引カテーテル4.00mm(12Fr)×50cm側孔:2孔		4545499001672	
MD-33114				緑	吸引カテーテル4.67mm(14Fr)×50cm側孔:2孔		4545499001689	

付属品：スベアキャップ、ネーミング用ラベル

【EOG滅菌済】

### 気管支肺胞洗浄用吸引キット


製品番号	ボトル容量	寸法(L×W×H)(mm)	接続部		梱包単位	JANコード
			ポンプ側	吸引口側		
MD-33250	150mL	57mm×39mm×143mm	オスコネクター	内径6.1mmテーパーチューブ	20本/ケース	4545499001696

付属品：スベアキャップ、予備コネクター、ネーミング用ラベル

【EOG滅菌済】

### 使用方法

1. 吸引側チューブを気管支用スコープの吸引口又は吸引カテーテルに接続します
2. コネクター付チューブを吸引源に接続します。
3. 吸引が働くと気管内の分泌液が回収ボトルに吸い込まれます。その際回収液が吸引源に吸い込まれないよう回収ボトルを垂直に保ってください。  
(吸引カテーテル付の製品は、吸引調節口を押えることにより、分泌液が回収ボトルに吸い込まれます。)
4. 採取後、チューブ付キャップを外しスベアキャップで閉じます。
5. ネーミング用ラベルに患者の名前を記入し回収ボトルに貼ります。

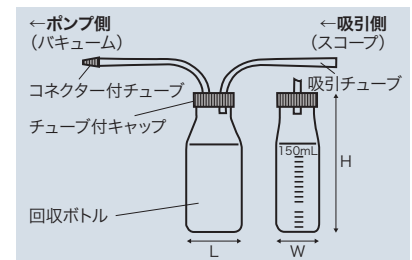

### お願い

- 本製品は、本製品の目的用途以外の用途には使用しないでください。
- 本製品は、本製品の使用に熟練した医師、又はその管理下でご使用ください。
- 本製品の使用に際しては、電子添文をご確認の上ご使用ください。
- 本製品の製品ラベルにより、製品のサイズ、有効期限を確認してください。有効期限切れのものは使用しないでください。
- 本製品は1回限りの使用で使い捨て、再度の使用はさけてください。
- 本製品の梱包に、破損、水濡れがあるものは汚染されている危険性がありますので、使用しないでください。
- 本製品は直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。
- 本製品に関して不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

※製品の規格・外観・その他を改良するために予告なく変更することがあります。

製造販売業者

## SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号

【お問い合わせ先電話番号】

東京 ☎03(5462)4824

札幌 ☎0133(60)2400

仙台 ☎022(742)2471

北関東 ☎0495(77)2621

大阪 ☎06(7659)2156

名古屋 ☎052(726)8381

広島 ☎082(542)1381

福岡 ☎092(624)0123

取扱店