


# FFPバッグ解凍器 FP-40 かんたん操作ガイド 1

## 準備

詳細は取扱説明書をご覧ください。



## 解凍

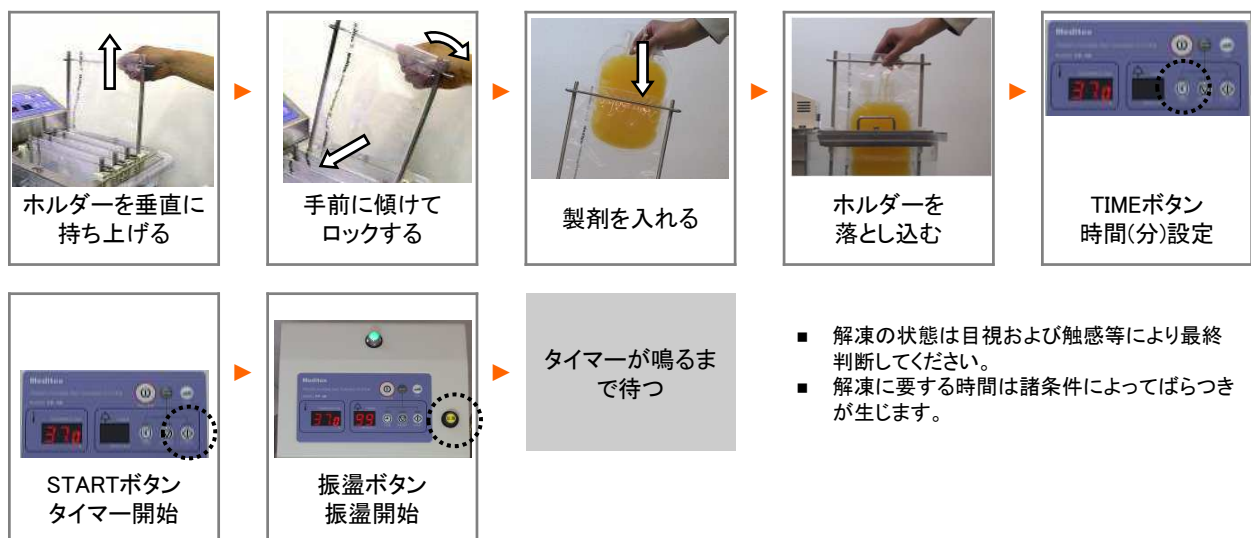

## 取り出し



この簡単操作ガイドは製造販売業者と販売業者で作成したものです。

販売業者

**SBカワスミ株式会社**

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号  
TEL 044-589-8070 URL www.sb-kawasumi.jp

製造販売業者

**北陽電機株式会社**

〒364-0006 埼玉県北本市北本1-156  
TEL.048-591-3618

# FFPバッグ解凍器 FP-40 かんたん操作ガイド 2

## 清掃方法

詳細は取扱説明書をご覧ください。

### 各部の分離手順



本機器を清掃する場合は、セットアップと逆の順序で各部を分離してから行います。

1. ホルダーをホルダーガイドから全て抜き取ります
2. ホルダーガイドアセンブリを水槽から取り外します
3. 温度コントローラを水槽から取り出します  
水槽に水が張ってある場合は排水してください

### 水槽



### ホルダー



### ホルダーガイド



- 水槽内の水は毎日交換し、水槽も洗浄して清潔に保ってください。
- 柔らかいスポンジ等を使い中性洗剤で水洗いしてください。
- 水槽は表面に傷が付きやすいので、タワシ等を使わないでください。
- プラスチック部品に対して薬品等は使用しないでください。

### 温度コントローラ



- 水を含ませた布などを絞って拭いてください。
- 本機器は簡易な防滴仕様であり、防水ではありませんので、機器に水をかけて洗うことは避けてください。

### プロテクタバッグ



- プロテクタバッグは使用毎に新品と交換してください。

この簡単操作ガイドは製造販売業者と販売業者で作成したものです。



販売業者

**SBカワスミ株式会社**

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号  
TEL 044-589-8070 URL www.sb-kawasumi.jp

製造販売業者


**北陽電機株式会社**

〒364-0006 埼玉県北本市北本1-156  
TEL.048-591-3618

# FFPバッグ解凍器 FP-40 かんたん操作ガイド 3

## こんなときは・・・

詳細およびその他の事例は取扱説明書をご覧ください。

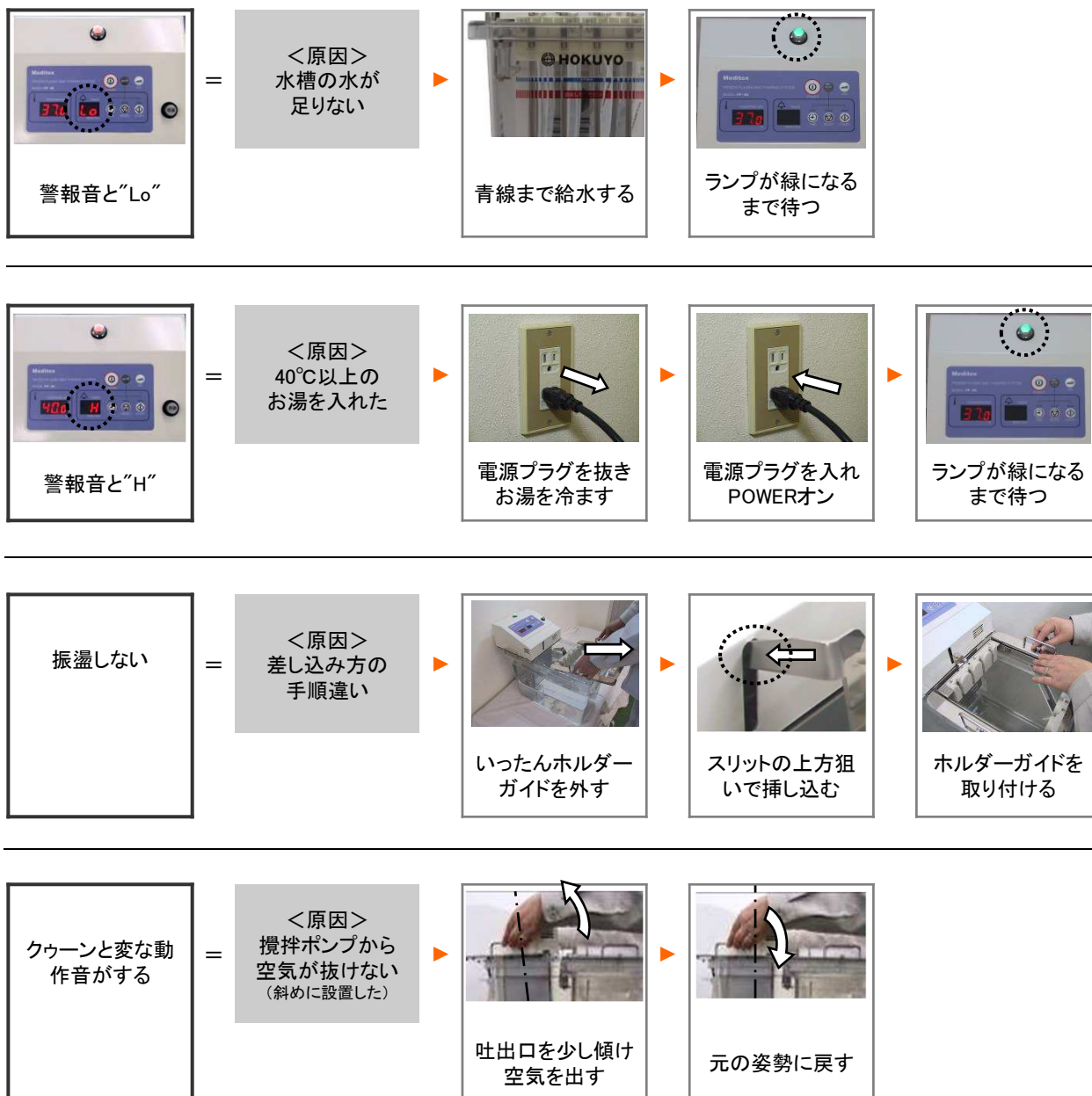

この簡単操作ガイドは製造販売業者と販売業者で作成したものです。



販売業者

**SBカワスミ株式会社**

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号  
TEL 044-589-8070 URL www.sb-kawasumi.jp

製造販売業者

**北陽電機株式会社**

〒364-0006 埼玉県北本市北本1-156  
TEL.048-591-3618