

重量式採血機 KL-102 採血量・バッグ風袋量設定マニュアル

※採血量を変更する際、またはバッグのメーカーを変更する際に設定してください。

電源投入	<ol style="list-style-type: none"> ① バッグ載せ皿に何も載っていない状態で電源を入れます。 ② フロントパネル下の設定パネルカバーを一度押し込んで開くと設定パネルが現れます。(もう一度押し込むと閉じます) 	<p>①電源を入れます</p> <p>②フロントパネルを開きます。</p>																														
採血量の設定	<ol style="list-style-type: none"> ③ 「設定」ボタンを押し、採血量を点灯させます。「設定」ボタンを押す度に採血量→風袋量→風袋処理の順に切り替わります(ここでは採血量を選択)。LEDモニタ横の単位表示は“g”が点灯します。 																															
	<ol style="list-style-type: none"> ④ 操作パネルで、設定を行いたい血液バッグを選択します。(ここでは400mLのシングルバッグの採取量を420gと設定。400とSを選択する。)選択されたバッグのLEDが点灯します。 																															
	<ol style="list-style-type: none"> ⑤ 設定パネルの「▲」または「▼」を押して、入力したい数値に合わせます。 ⑥ 数値を合わせ、「入力」ボタンを押すと設定完了です。 ・必要があれば③④を再度行い、入力値を確認してください。 ⑦ 設定パネルカバーを閉じ、電源を切ってください。 																															
バッグ風袋量の設定	<ol style="list-style-type: none"> ③ 「設定」ボタンを押し、風袋量を点灯させます。「設定」ボタンを押す度に採血量→風袋量→風袋処理の順に切り替わります(ここでは風袋量を選択)。LEDモニタ横の単位表示は“g”が点灯します。 																															
	<ol style="list-style-type: none"> ④ 操作パネルで設定を行いたい血液バッグを選択します。(ここでは400mLのSBカワスミ製シングルバッグの風袋量を88gと設定。400とSを選択する。)選択されたバッグのLEDが点灯します。 																															
	<ol style="list-style-type: none"> ⑤ 設定パネルの「▲」または「▼」を押して、入力したい数値に合わせます。 ⑥ 数値を合わせ、「入力」ボタンを押すと設定完了です。 ・必要があれば③④を再度行い、入力値を確認してください。 ⑦ 設定パネルカバーを閉じ、電源を切ってください。 																															
参考	<ul style="list-style-type: none"> SBカワスミ製バッグをご使用になる場合は、右表の風袋重量を参考にしてください。 他社製バッグをご使用になる場合は、バッグメーカーに確認した風袋重量を入力してください。 誤操作防止のため不必要なバッグを選択出来ないようにするには、そのバッグの採血量に“0”を入力してください。 	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">400 mL</th> <th colspan="2">200 mL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>採血量</th> <th>風袋量</th> <th>採血量</th> <th>風袋量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>シングル S</td> <td>420</td> <td>88</td> <td>210</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>トリプル T</td> <td>420</td> <td>148</td> <td>210</td> <td>108</td> </tr> </tbody> </table> <p>血液比重を1.05として400mL,200mL採血する際のSBカワスミ製自己血バッグの設定値(単位:g)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">バッグ容量</th> <th colspan="2">設定可能範囲</th> </tr> <tr> <th>採血量</th> <th>風袋量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200mL</td> <td>200～399 あるいはゼロ</td> <td rowspan="2">25～399</td> </tr> <tr> <td>400mL</td> <td>400～599 あるいはゼロ</td> </tr> </tbody> </table> <p>採血量にゼロを入力することで、そのバッグは選択出来なくなります。</p>		400 mL		200 mL			採血量	風袋量	採血量	風袋量	シングル S	420	88	210	54	トリプル T	420	148	210	108	バッグ容量	設定可能範囲		採血量	風袋量	200mL	200～399 あるいはゼロ	25～399	400mL	400～599 あるいはゼロ
	400 mL		200 mL																													
	採血量	風袋量	採血量	風袋量																												
シングル S	420	88	210	54																												
トリプル T	420	148	210	108																												
バッグ容量	設定可能範囲																															
	採血量	風袋量																														
200mL	200～399 あるいはゼロ	25～399																														
400mL	400～599 あるいはゼロ																															

販売名: カワスミ採血機 医療機器承認番号: 21000BZZ00513000
必ず取扱説明書の内容をご確認の上で、ご活用ください。

SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号
TEL 044-589-8070 URL www.sb-kawasumi.jp