

病院用 ドナーメイト KL-103 採血量・バッグ風袋量設定マニュアル

※採血量を変更する際、またはバッグのメーカーを変更する際に設定してください。

設定モードへの移行																					
<p>設定モード</p> <ol style="list-style-type: none"> ① バッグ載血に何も載っていない状態で電源スイッチを入れてください。 ② スタンバイ画面の「設定」ボタンを2秒間長押ししてください。 ③ 設定を行いたい血液バッグの容量、タイプを選択してください。 	<p>① 電源 入切</p> <p>② 点検 設定 揺動 自動 2秒長押しで切替ります。 採血目標 400g</p> <p>③ 戻る 採血量 *** 風袋量 *** 400mL 増 減 シングル 入力</p>																				
採血量と風袋量の設定 (例: 400mL、シングルバッグで『採血量 = 350g』『風袋量 = 105g』を設定する場合)																					
<p>採血量設定</p> <ol style="list-style-type: none"> ④ 「採血量」表示を押してください。選択した項目は黒く反転します。 ⑤ 「増」「減」ボタンを押して、350gに合わせてください。 ⑥ 「入力」ボタンを押すと入力完了です。 	<p>④ 戻る 採血量 *** 風袋量 *** 400mL 増 減 シングル 入力</p> <p>⑤ 戻る 採血量 *** 風袋量 *** 400mL 増 減 シングル 入力</p> <p>⑥ 戻る 採血量 350 風袋量 *** 400mL 増 減 シングル 入力</p>																				
<p>風袋量設定</p> <ol style="list-style-type: none"> ⑦ 「風袋量」表示を押してください。選択した項目は黒く反転します。 ⑧ 「増」「減」ボタンを押して、105gに合わせてください。 ⑨ 「入力」ボタンを押すと入力完了です。 	<p>⑦ 戻る 採血量 350 風袋量 *** 400mL 増 減 シングル 入力</p> <p>⑧ 戻る 採血量 350 風袋量 *** 400mL 増 減 シングル 入力</p> <p>⑨ 戻る 採血量 350 風袋量 105 400mL 増 減 シングル 入力</p>																				
採血量と風袋量の設定 (例: 400mL、トリプルバッグを『選択操作できないよう』に設定する場合)																					
<p>過誤防止設定</p> <ol style="list-style-type: none"> ⑩ 採血できないようにしたい血液バッグの容量、タイプを選択してください。 ⑪ 「採血量」表示を選択後、「増」「減」ボタンを押して、0gに合わせてください。 ⑫ 「入力」ボタンを押すと入力完了です。 	<p>⑩ 戻る 採血量 420 風袋量 259 400mL 増 減 トリプル 入力</p> <p>⑪ 戻る 採血量 420 風袋量 259 400mL 増 減 トリプル 入力</p> <p>⑫ 戻る 採血量 0 風袋量 259 400mL 増 減 トリプル 入力</p> <p>✓ 過誤防止設定では風袋量に数値が入力されていても問題ありません。 ✓ 一度選択できないようにしたバッグを再度選択できるようにするには、採血量に数値を入力することで選択できるようになります。</p>																				
スタンバイ画面に戻る																					
<p>スタンバイ画面</p> <ul style="list-style-type: none"> ● スタンバイ画面に戻るには、「戻る」ボタンを押してください。 	<p>戻る 採血量 *** 風袋量 *** 400mL 増 減 シングル 入力</p> <p>点検 設定 揺動 自動 400mL シングル スタンバイ</p>																				
参考																					
<ul style="list-style-type: none"> ● SBカワスミ製バッグをご使用になる場合は、右表の風袋重量を参考にしてください。 ● 他社製バッグをご使用になる場合は、バッグメーカーに確認した風袋重量を入力してください。 	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">400 mL</th> <th colspan="2">200 mL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>採血量</th> <th>風袋量</th> <th>採血量</th> <th>風袋量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>シングル S</td> <td>420</td> <td>88</td> <td>210</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>トリプル T</td> <td>420</td> <td>148</td> <td>210</td> <td>108</td> </tr> </tbody> </table> <p>血液比重を1.05として400mL,200mL採血する際のSBカワスミ製自己血バッグの設定値(単位: g)</p>		400 mL		200 mL			採血量	風袋量	採血量	風袋量	シングル S	420	88	210	54	トリプル T	420	148	210	108
	400 mL		200 mL																		
	採血量	風袋量	採血量	風袋量																	
シングル S	420	88	210	54																	
トリプル T	420	148	210	108																	