

病院用 ドナーメイト KL-103 採血量・バッグ風袋量設定マニュアル

※採血量を変更する際、またはバッグのメーカーを変更する際に設定してください。

設定モードへの移行																					
設定モード	① バッグ載血に何も載っていない状態で電源スイッチを入れてください。 ② スタンバイ画面の「設定」ボタンを2秒間長押ししてください。 ③ 設定を行いたい血液バッグの容量、タイプを選択してください。 ① ② ③																				
採血量と風袋量の 設定 （例：400mL、シングルバッグで『採血量 = 350g』『風袋量 = 105 g』を設定する場合）																					
採血量設定	④ 「採血量」表示を押してください。選択した項目は黒く反転します。 ⑤ 「増」「減」ボタンを押して、350gに合わせてください。 ⑥ 「入力」ボタンを押すと入力完了です。 ④ ⑤ ⑥																				
風袋量設定	⑦ 「風袋量」表示を押してください。選択した項目は黒く反転します。 ⑧ 「増」「減」ボタンを押して、105gに合わせてください。 ⑨ 「入力」ボタンを押すと入力完了です。 ⑦ ⑧ ⑨																				
採血量と風袋量の 設定 （例：400mL、トリプルバッグを『選択操作できないよう』に設定する場合）																					
過誤防止設定	⑩ 採血できないようにしたい血液バッグの容量、タイプを選択してください。 ⑪ 「採血量」表示を選択後、「増」「減」ボタンを押して、0gに合わせてください。 ⑫ 「入力」ボタンを押すと入力完了です。 ⑩ ⑪ ⑫ ✓ 過誤防止設定では風袋量に数値が入力されていても問題ありません。 ✓ 一度選択できないようにしたバッグを再度選択できるようにするには、採血量に数値を入力することで選択できるようになります。																				
スタンバイ画面に戻る																					
スタンバイ画面	● スタンバイ画面に戻るには、「戻る」ボタンを押してください。 スタンバイ																				
参考																					
● SBカワスミ製バッグをご使用になる場合は、右表の風袋重量を参考にしてください。 ● 他社製バッグをご使用になる場合は、バッグメーカーに確認した風袋重量を入力してください。	<table><tr><th></th><th colspan="2">400mL</th><th colspan="2">200mL</th></tr><tr><th></th><th>採血量</th><th>風袋量</th><th>採血量</th><th>風袋量</th></tr><tr><td>シングル S</td><td>420</td><td>86</td><td>210</td><td>54</td></tr><tr><td>トリプル T</td><td>420</td><td>151</td><td>210</td><td>108</td></tr></table> 血液比重を1.05として400mL,200mL採血する際のSBカワスミ製自己血バッグの設定値（単位：g）		400mL		200mL			採血量	風袋量	採血量	風袋量	シングル S	420	86	210	54	トリプル T	420	151	210	108
	400mL		200mL																		
	採血量	風袋量	採血量	風袋量																	
シングル S	420	86	210	54																	
トリプル T	420	151	210	108																	

販売名：ドナーメイト 医療機器認証番号：225AABZX00093000

必ず取扱説明書の内容をご確認の上で、ご活用ください。
このマニュアルは「メモリー方式」での使用に基づいています。

SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号
TEL 044-589-8070 URL www.sb-kawasumi.jp

103-2110-01-KL