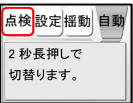
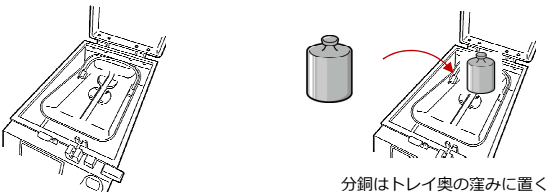
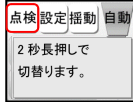


ドナーメイトKL-103 重量点検/校正マニュアル

重量点検	
① スタンバイ画面の「点検」ボタンを2秒間長押ししてください。	  
② バッグ載皿に何も無いとき 0g を表示します。 ③ バッグ載皿に500g分銅を載せたとき 500g を表示します。	   分銅はトレイ奥の窪みに置く
④ スタンバイ画面に戻るには「戻る」ボタンを押してください。	 
重量校正	
① スタンバイ画面の「点検」ボタンを2秒間長押ししてください。	  
② ずれを確認した状態から「校正」ボタンを押します。	
③ バッグ載皿に何も載せないで「0g入力」を押します。	 
④ 0g入力され、ピッという入力音と同時に500g入力画面に移行します。	
⑤ バッグ載皿に500g分銅を載せて「500g入力」を押します。	 
⑥ 500g入力され、ピッという入力音と同時に500g表示されればOKです。	
⑦ さらに500g分銅を撤去した後の表示が0g表示されればOKです。 ⑧ 戻るを押してスタンバイ画面に戻ります。	 重量校正は必ず校正済みの500g分銅を使用してください。 ⑦の作業後、0g/500gと表示させることが出来なかった場合は、②～⑦の操作を繰り返してください。

販売名：ドナーメイト 医療機器認証番号：225AABZX00093000

必ず取扱説明書の内容をご確認の上で、ご活用ください。

SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号
TEL 044-589-8070 URL www.sb-kawasumi.jp

103-2110-01-KL