



<使用準備>


①セットの4箇所のカランプを完全に閉じる。

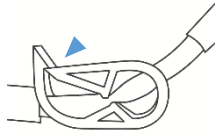



②生理食塩液をイルリガートル台に吊り下げ、本品のプラスチック針(びん針)のゴム製キャップを左右に引き裂いて開封する。

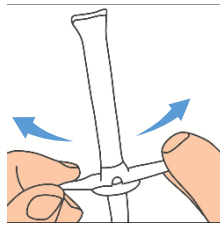

③イオン交換樹脂を充填したフィルター本体上部のプラスチック針を生理食塩液のポートに穿刺する。

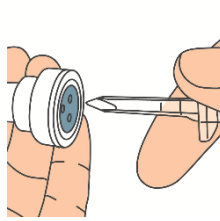



④フィルター本体下にある連通ピースを折り曲げ完全に開通する。

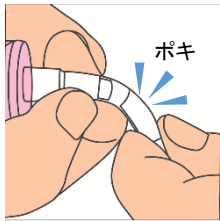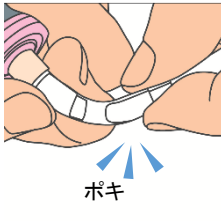

(フィルターの洗浄)

⑤廃液バッグ及びプラスチック針のカランプを開き、生理食塩液100ml以上を流す。


⑥プラスチック針のカランプを閉じ、通気フィルターの連通ピースを折り曲げ完全に開通し、通気フィルターのカランプを開き生理食塩液を廃液バッグに移す。

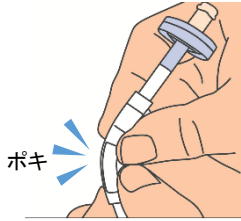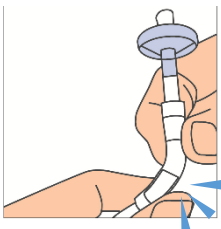


⑦通気フィルターのカランプを閉じる。

<使用開始>

⑧セット下部のルアーコネクター(雌嵌合部)にシリンジを接続する。

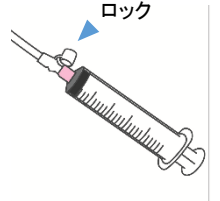

⑨転倒混和した輸血バッグの輸血口にプラスチック針を穿刺し、プラスチック針の針基からシリンジまでの落差を35~40cmに調整する。

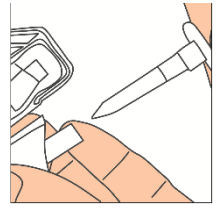

⑩プラスチック針のカランプを開き血液処理を開始する。

⑪分岐管から廃液バッグにつながるチューブまで血液が流れたら廃液バッグのカランプを閉じる。

⑫ルアーコネクターのカランプを開け、シリンジに貯血する。

⑬その際、シリンジに貯血するときの処理速度は15mL/minを超えないようにする。また、その時の血液処理量は100mL以下である。

⑭シリンジに目的の血液量が溜まったらかランプを閉じる。

⑮シリンジに貯血した血液は清潔に取扱い、保存せず速やかに使用する。

使用後、生理食塩液による回収は行わないこと。

こちらのQRコードにアクセスして頂きますと、弊社ホームページから本製品の使用動画および使用マニュアルをご覧いただけます。

