

FFP

新鮮凍結血漿

ドライモード 解凍器

2バッグ対応



4バッグ対応



ドライに、かんたん解凍。

- 水を使わないドライ方式 ▶ 衛生管理が楽です
- 水を温める待ち時間なし ▶ 電源オンですぐ使えます
- 製剤の仕上がり温度指定 ▶ 自動で解凍完了をお知らせします
- 異なるバッグ容量の解凍 ▶ それぞれの仕上がり温度でお知らせします
- あとからバッグを追加も ▶ それぞれの仕上がり温度でお知らせします
- 破損バッグから血液漏れ ▶ プロテクタバッグが受け止めます
- 開発から製造まで自社製 ▶ 機能向上にバージョンアップで対応します

 **HOKUYO**

エビデンスのあるモノづくり

北陽電機株式会社

仕様

	2バッグ対応	4バッグ対応
販売名 / 型式	FFP解凍器 FP-2000 G2	FFP解凍器 FP-4000 G2
対応バッグ	新鮮凍結血漿 120ml, 240ml, 480ml	
平均解凍時間	120ml ▶ 12'25" ±1'13" S.D. 240ml ▶ 21'17" ±1'13" S.D. 480ml ▶ 30'50" ±1'48" S.D. 譲渡血によるプール製剤 -30℃凍結 20℃仕上がりモードにて解凍(各 N=3)	
解凍モード	ノーマル解凍モード: 20℃仕上がりで完了・お知らせ しっかり加温モード: 30℃仕上がりで完了・お知らせ	
電源の定格	100V 50-60Hz	
ピーク最大電流	6A	12A
大きさ[mm]	幅276×奥行415×高330	幅510×奥行420×高330
重さ	12Kg	21.6Kg
医療機器クラス分類	クラスI(一般医療機器) 血漿融解装置	
製造販売届出番号	11B3X10047000004	11B3X10047000005
〔必須消耗品〕 プロテクタバッグ	 <p>解凍に必要な消耗品です。 FFPと機器が直接触れないよう保護し、 万が一の際の血液もれを受け止めます。 品番: FPD-P050-100P (100枚入)</p>	
〔オプション部品〕 ダストカバー	 <p>FP-4000G2に装着した例</p> <p>開閉式の透明な樹脂カバーです。 埃や異物などが機器内に入るのを防ぎます。 (取り付けの有無による解凍性能への影響はありません)</p>	
	品番: FP2000-P086	品番: FP4000-P086

お試し用のデモ機と模擬バッグをご準備しております どうぞお気軽にお申し付けください

製造販売元

北陽電機株式会社

〒364-0006 埼玉県北本市北本1-156

TEL 048-591-3618 URL www.hokuyo-denki.co.jp

販売元

SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号

TEL 044-589-8070 URL www.sb-kawasumi.jp