


# EGIS Biliary ステント

胆管への追従性を追求した  
極小セルサイズのダブルステント


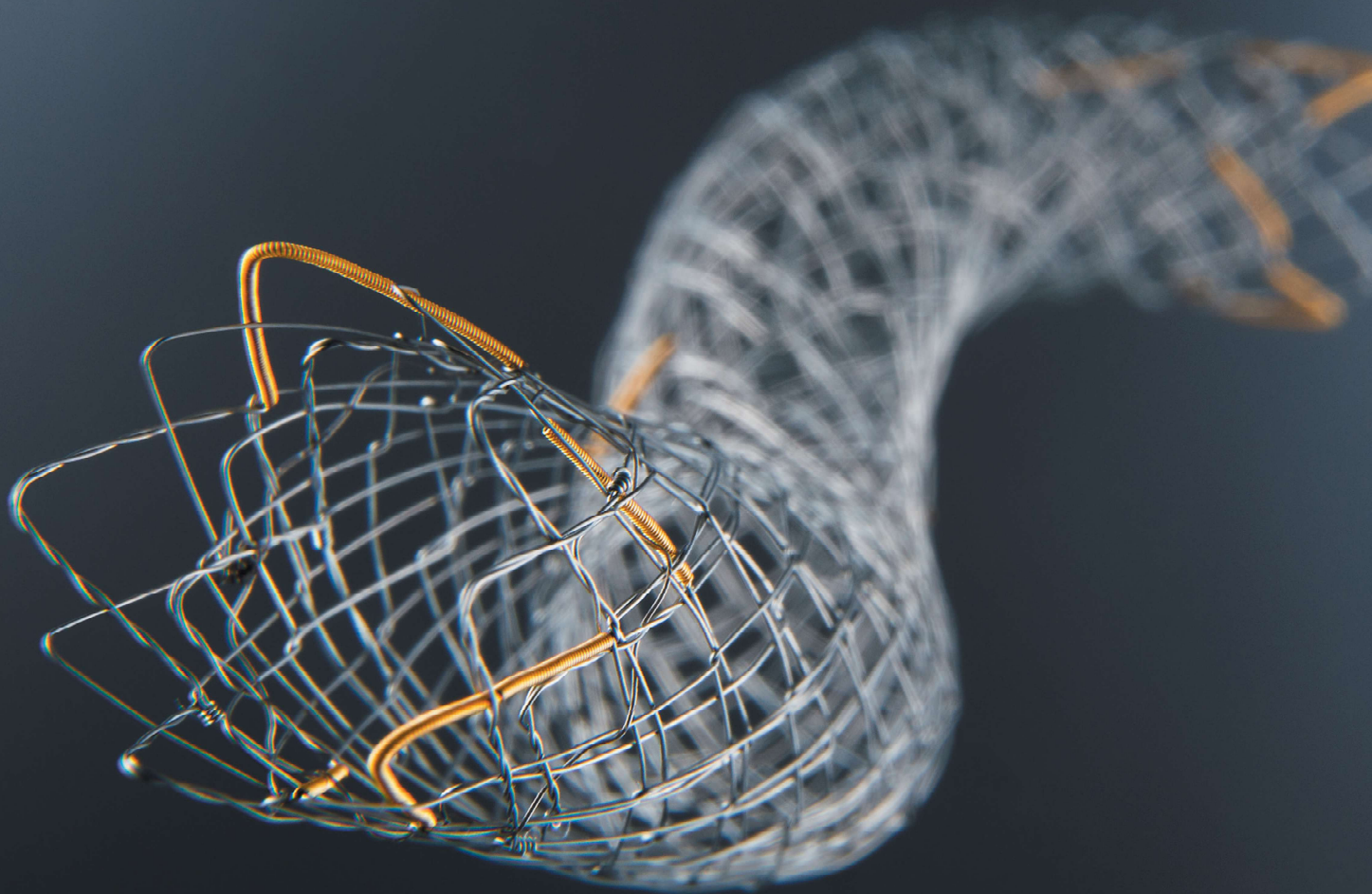


## 独自の二重構造により、 Axial ForceとRadial Forceの バランスを追求しました




### ダブルベアースtent

- ベアースtentを二重に重ねる独自の編み込み技術により、極小セルサイズながら弱いAxial Forceを実現。胆嚢管・膵管を塞がずにイングロースの低減を目指しました。
- 低Axial Forceにより屈曲した胆管に対しても適したConformabilityを発揮します。

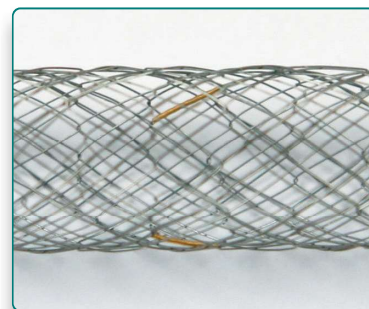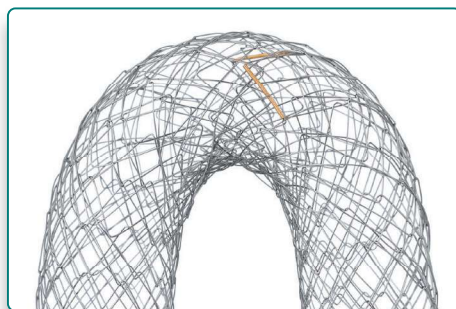


### ダブルカバードtent


- 二重のベアースtentの間にカバーを設置。低Axial Forceを維持しつつ、イングロースのリスクを軽減しました。
- カバー素材には表面がなめらかなシリコンを採用。不純物の付着による再閉塞のリスクを低減させます。
- 両端(約5mm)をベアー構造にすることでマイグレーションリスクを低減しています。

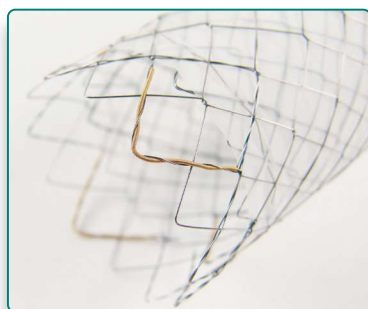




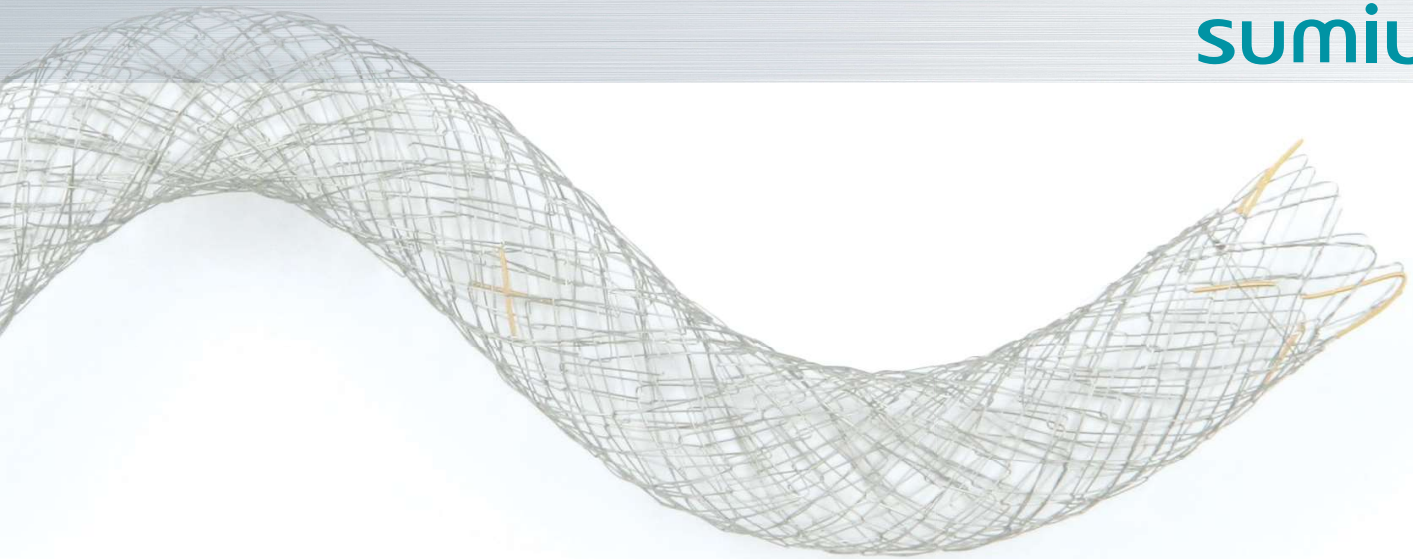

## 独自の研磨処理

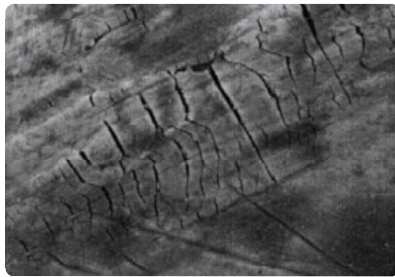

研磨処理前

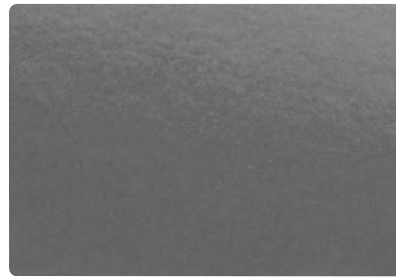


研磨処理後


- 不純物の付着低減によりステント内の閉塞を防止するため、ワイヤーを研磨処理。また、マイクロクラックの発生リスクも抑え、ワイヤー破断のリスクに備えます。

## ステントデリバリー


- 正確なステント留置のため、ブレイデッドステントながら拡張時のショートニングを抑えました。(20%–25%)

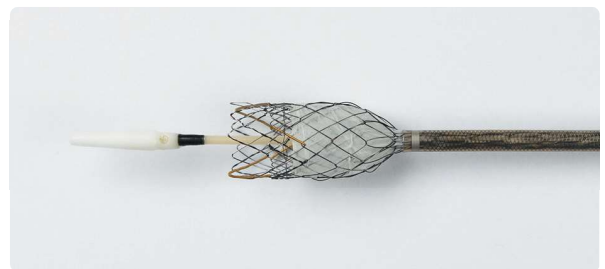


- ステントの両端と中心にそれぞれX線不透過マーカを設置。
- マーカーの配置を見直すことで視認性の向上を図りました。(ダブルベアーステント)

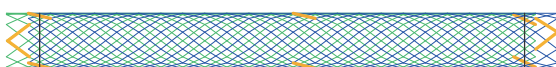

ダブルベアーステント

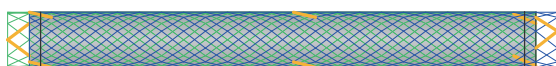


ダブルカバードステント

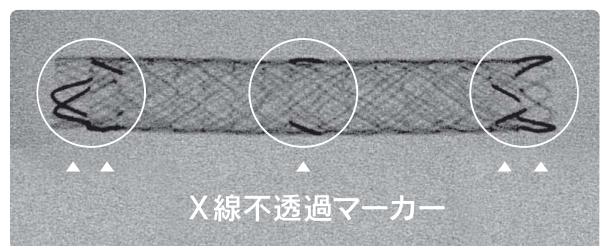

X線不透過マーカ

## 仕様

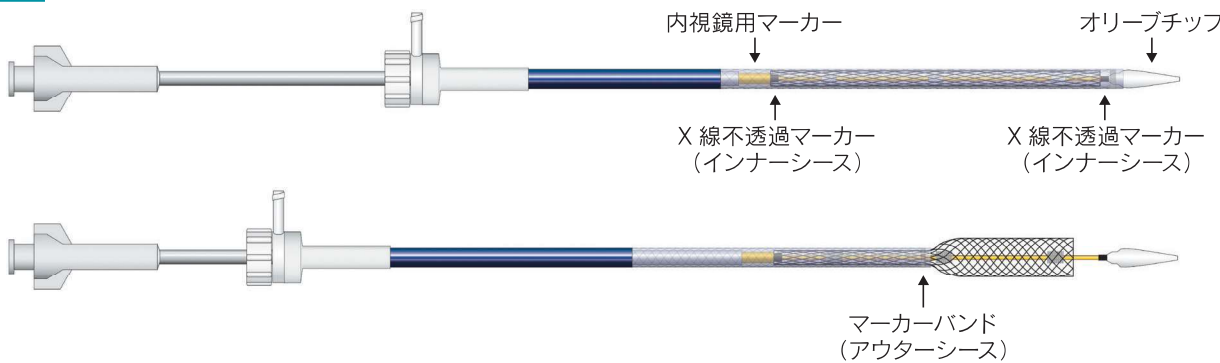

### ダブルベアースtent

販売名:EGISビリアリースtent 医療機器承認番号:23000BZX00053000

分野番号・分野名: 034 胆道stentセット  
分類名: (2)自動装着システム付 ①永久留置型 イ カバーなし クラス分類 III

製品番号		stent		デリバリーシステム		梱包単位
経内視鏡	経皮	径 (mm)	長(cm)	外径 (Fr)	有効長(cm)	
MD-DBE0804A	—	8	4	8	経内視鏡: 180 経皮: 50	1セット/ケース
MD-DBE0806A	MD-DBP0806A		6			
MD-DBE0808A	MD-DBP0808A		8			
MD-DBE1004A	—	10	4			
MD-DBE1005A	—		5			
MD-DBE1006A	MD-DBP1006A		6			
MD-DBE1007A	—		7			
MD-DBE1008A	MD-DBP1008A		8			
MD-DBE1009A	—	9				

【EOG滅菌済】

### ダブルカバードstent

販売名:EGISビリアリースtent 医療機器承認番号:23000BZX00053000

分野番号・分野名: 034 胆道stentセット  
分類名: (2)自動装着システム付 ①永久留置型 ア カバーあり クラス分類 III

製品番号		stent		デリバリーシステム		梱包単位
経内視鏡	経皮	径 (mm)	長(cm)	外径 (Fr)	有効長(cm)	
MD-DCE0806A	MD-DCP0806A	8	6	8	経内視鏡: 180 経皮: 50	1セット/ケース
MD-DCE0808A	MD-DCP0808A		8			
MD-DCE0812P	—		12			
MD-DCE1004A	—	10	4			
MD-DCE1006A	MD-DCP1006A		6			
MD-DCE1008A	MD-DCP1008A		8			

【EOG滅菌済】

- お願い
- ・本製品は本製品の目的用途以外の用途には使用しないでください。
  - ・本製品は本製品の使用に熟練した医師、またはその管理下でご使用ください。
  - ・本製品の使用に際しては、電子添文をご確認の上で使用ください。
  - ・本製品の製品ラベルにより、有効期限を確認してください。
  - ・有効期限切れのものは使用しないでください。
  - ・本製品は1回限りの使用で使い捨て、再度の使用は避けてください。
  - ・本製品の包装に破損、水濡れがあるものは汚染されている危険性がありますので、使用しないでください。
  - ・本製品は直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。
  - ・本製品に関して不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

※製品の規格・外観・その他を改良するために、予告なく仕様を変更することがあります。

【製造販売業者】

**SBカワスミ株式会社**

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号

【お問い合わせ先電話番号】

東京 ☎03-5462-4824 大阪 ☎06-7659-2156  
 札幌 ☎0133-60-2400 名古屋 ☎052-726-8381  
 仙台 ☎022-742-2471 広島 ☎082-542-1381  
 北関東 ☎0495-77-2621 福岡 ☎092-624-0123