

経皮経食道胃管挿入術用キット

# PTEGキット

PAT.

経腸栄養法、腸管減圧法として——  
PEG困難症例に適応可能



## PTEG

(Percutaneous **T**rans-**E**sophageal **G**astro-tubing)


経皮経食道胃管挿入術は、頸部食道瘻を造設し、チューブを留置する手技です。

### ▶ PEG困難症例に適応可能

経腸栄養法、腸管減圧法として、胃切除後、腹水貯留、胃前壁が腹壁に近接できない等の理由でPEGの造設が困難な症例に適応可能です。

#### 禁忌

- 1) 肝硬変の患者(食道静脈瘤があるか疑われる患者等)
- 2) 血液凝固能に異常を認める患者(血液抗凝固剤を投与している患者等)
- 3) 穿刺経路の確保が困難な患者
- 4) 反回神経麻痺の既往があるか疑われる患者

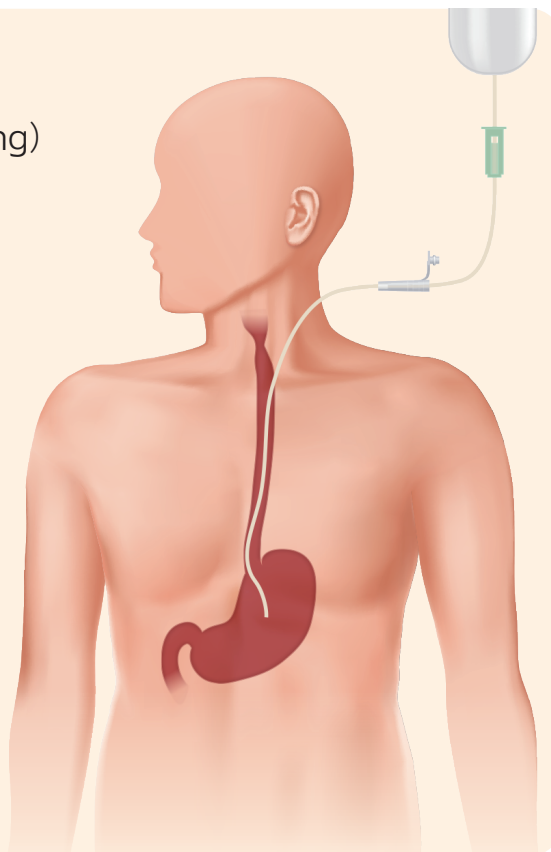

### PTEGのメリット

#### 患者ストレスを軽減

鼻腔や咽頭にカテーテルがないため、疼痛や違和感等のストレスを軽減します。

#### 管理が容易

造設後の管理が容易で、在宅の管理にも適しています。

**PTEGキットはPTEGを安全・確実に行うための造設・交換キットです**

### PTEG造設方法




経鼻的に挿入した非破裂型の穿刺用バルーンカテーテルにより、食道を拡張、エコー下に穿刺し、カテーテルを留置します。  
PTEGキットには当社独自の非破裂型の穿刺用バルーン (RFB) カテーテルを採用。穿刺後もバルーンは破裂しません。



ガイドワイヤケースにスライダを設けました。ガイドワイヤの穿刺針への挿入が容易です。

## 造設キット

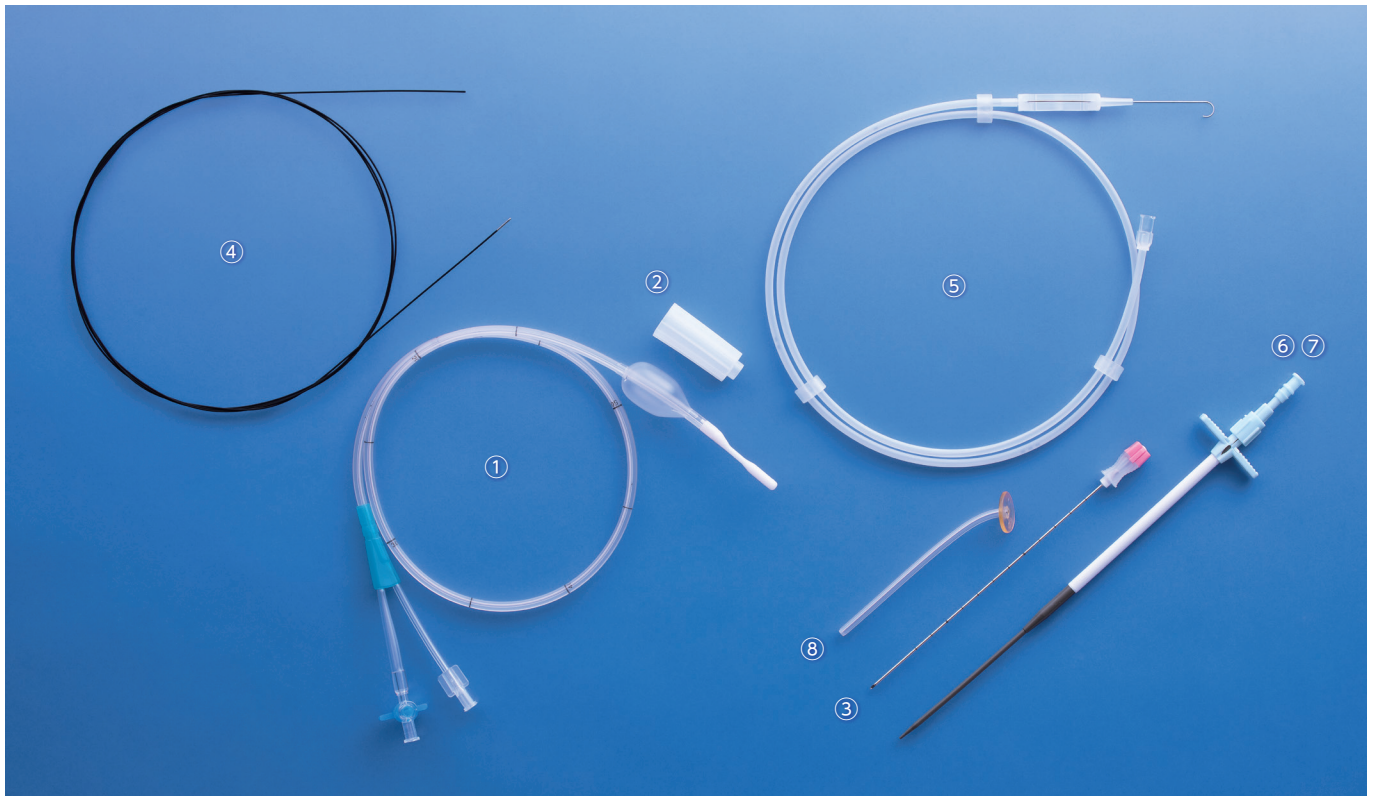

## 仕様

医療機器承認番号: 22200BZX00821000

クラス分類Ⅲ

製品番号	セット内容								梱包単位	JANコード
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		
	穿刺用バルーンカテーテル	穿刺用バルーン折りたたみ補助具	穿刺針	ガイドワイヤ I	ガイドワイヤ II	8Frダイレータ	18Frピールアウェイシースダイレータ	PTEG用瘻孔閉塞防止器具		
	14Fr×70cm バルーン注入容量 10mL	ポニョラー™	18G×15cm	ストレート型 0.035"×200cm	J型 0.035"×100cm	25cm	16Frダイレータ (15cm) + 18Frピールアウェイ シース(10cm)	レスキュー チューブ™		
MD-46120A	○	○	○	○	○	○	○	○	1セット	4545499064226
MD-46130	—	—	—	—	—	○	○	—	ケース	4545499057433

【EOG滅菌済】

## 穿刺用バルーンカテーテルの使用前準備 ポニョラー™ (穿刺用バルーン折りたたみ補助具) の使い方



1. 穿刺用バルーンカテーテルをプライミングします。




2. コックを開放状態のまま (手元側)、穿刺用バルーンカテーテルをポニョラー™に押し込みます。その後、シリンジで強く吸引します。



3. コックを閉め (手元側)、ポニョラー™から、穿刺用バルーンカテーテルを抜きます。

## 製品ラインナップー留置カテーテル／ボタンタイプ&チューブタイプ

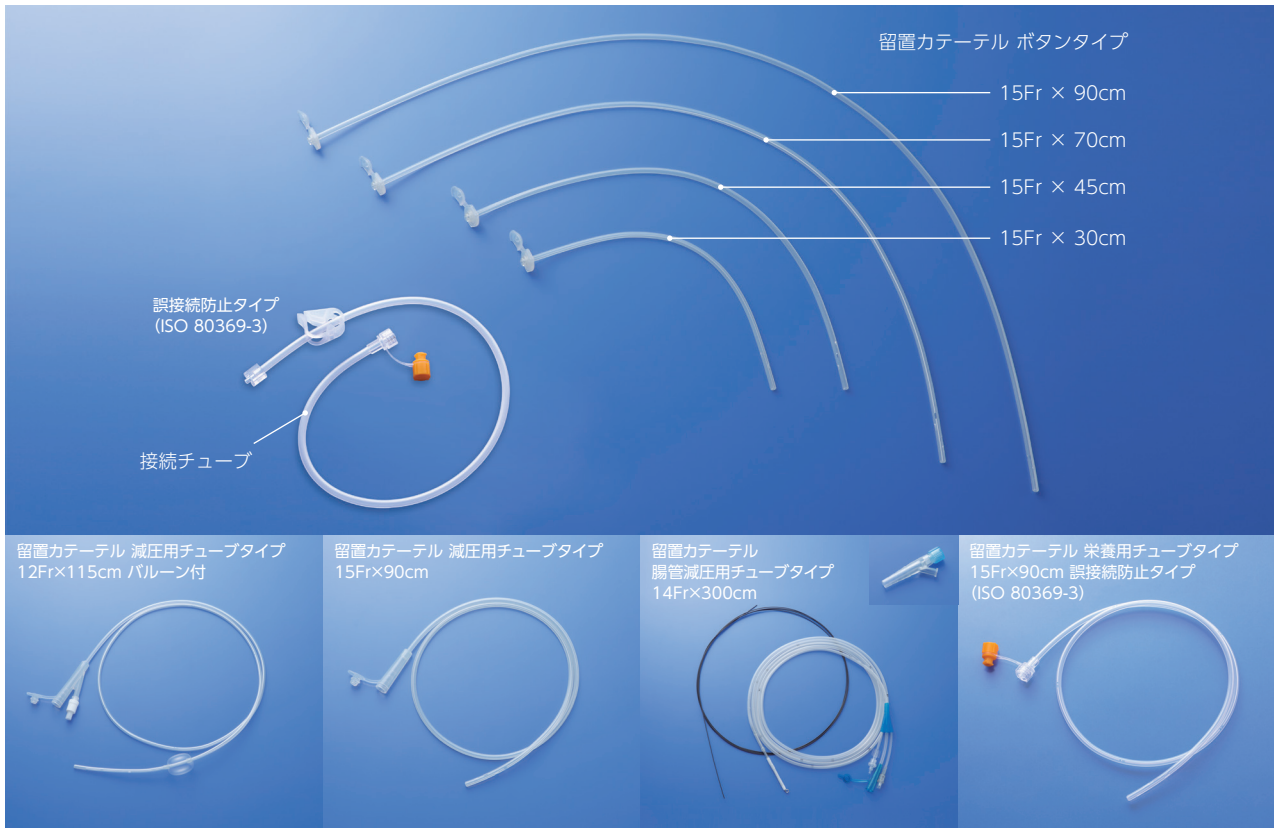

症例に合わせて種々の留置カテーテルを選択できます

※附属品は、下記の品番表をご確認ください。

## 仕様

医療機器承認番号：22200BZX00821000

分類番号・分野：167 交換用経皮経食道胃管カテーテル クラス分類Ⅲ

種類	製品番号	セット内容							ISO 80369-3	梱包単位	JANコード				
		カテーテル径	カテーテル長	バルーン	付属品										
留置カテーテル／ ボタンタイプ	MD-46113A	15Fr/5.0mm	30cm	—	スタイレット	ガイドワイヤ	接続チューブ	固定バンド	○	○	1セット/ケース	4545499070869			
	MD-46163A				25.5cm	—						6.1mm × 60cm	—	4545499070876	
	MD-46115A				40.5cm	—								—	4545499070883
	MD-46165A				—	—								—	4545499070890
	MD-46167A				—	—								—	4545499070906
	MD-46169A				—	—								—	4545499070913
留置カテーテル／ 減圧用チューブタイプ	MD-46102	12Fr/4.0mm	115cm	○(注入容量15mL)	—	—	—	—	—	—	4545499057303				
	MD-46104	15Fr/5.0mm	90cm	—	—	—	—	—	—	—	4545499057327				
留置カテーテル／腸管減圧用チューブタイプ	MD-46106	14Fr/4.7mm	300cm	○(注入容量20mL)	—	—	—	—	—	—	4545499070937				
留置カテーテル／栄養用チューブタイプ	MD-46108	15Fr/5.0mm	90cm	—	—	—	—	○	—	—	4545499070920				

【EOG滅菌済】

## 関連製品

### PTEG用接続チューブ

医療機器届出番号：14B1X10030000013 クラス分類Ⅰ

種類	製品番号	チューブ 外径	有効長	仕様	規格	梱包 単位	JANコード
接続 チューブ	MD-46180	6.1mm	60cm	留置カテーテル ボタンタイプ用・ クランプ付	旧規格 (888号通知規格) ISO80369-3	5本 /ケース	4545499057501
	MD-46180A						4545499070944

【無滅菌】

### PTEG用固定バンド

雑品扱い

種類	製品番号	仕様	梱包単位	JANコード
固定バンド	MD-46181	留置カテーテル／ボタンタイプ用	5本/ケース	4545499057518

【無滅菌】

### PTEG用瘻孔閉塞防止器具

医療機器承認番号：22200BZX00821000 クラス分類Ⅲ

種類	製品番号	チューブ外径	有効長	仕様	梱包単位	JANコード
レスキューチューブ	MD-46184	12Fr/4.0mm	10cm	—	10本/ケース	4545499070951

【EOG滅菌済】

※製品の規格・外観・その他を改良するために、予告なく仕様を変更することがあります。

【製造販売業者】

# SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号

【お問い合わせ先電話番号】

東京 ☎03-5462-4824 大阪 ☎06-7659-2156  
 札幌 ☎0133-60-2400 名古屋 ☎052-726-8381  
 仙台 ☎022-742-2471 広島 ☎082-542-1381  
 北関東 ☎0495-77-2621 福岡 ☎092-624-0123