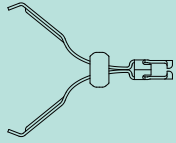
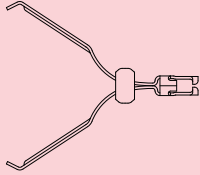
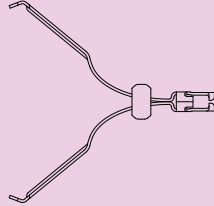
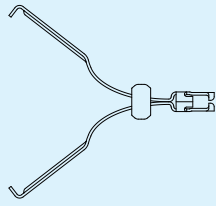


仕様

SBクリップ

販売名:SBクリップ 医療機器承認番号:23000BZX00083000

クラス分類 III

製品番号	MD-48010	MD-48020	MD-48030	MD-48031
タイプ呼称	ショート	スタンダード	ロング	ロング90°
形状				
開き幅	7.0mm	8.5mm	10.0mm	9.5mm
色表示	グリーン	ピンク	パープル	ブルー
梱包単位	40個／ケース	40個／ケース	40個／ケース	40個／ケース
JANコード	4545499068996	4545499069009	4545499069016	4545499069023

【EOG滅菌済】

SBクリップアプリケータ

販売名:SBクリップアプリケータ 医療機器届出番号:14B1X10030000020

クラス分類 I

製品番号	挿入部最大径	有効長	適用鉗子口径	梱包単位	JANコード
	(mm)	(mm)	(mm)		
MD-48100	2.75	1950	2.8以上	1本／ケース	4545499068927

【未滅菌・オートクレーブ滅菌対応】

- お願い
- ・本製品は本製品の目的用途以外の用途には使用しないでください。
 - ・本製品は本製品の使用に熟練した医師、またはその管理下でご使用ください。
 - ・本製品の使用に際しては、電子添文をご確認の上ご使用ください。
 - ・本製品の製品ラベルにより、有効期限を確認してください。
 - 有効期限切れのものは使用しないでください。
 - ・SBクリップは1回限りの使用で使い捨て、再度の使用は避けてください。
 - ・本製品の包装に破損、水濡れがあるものは汚染されている危険性がありますので、使用しないでください。
 - ・本製品は直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。
 - ・本製品に関して不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

※製品の規格・外観・その他を改良するために、予告なく仕様を変更することがあります。

【製造販売業者】


SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号

【お問い合わせ先電話番号】

東京	☎03-5462-4824	大阪	☎06-7659-2156
札幌	☎0133-60-2400	名古屋	☎052-726-8381
仙台	☎022-742-2471	広島	☎082-542-1381
北関東	☎0495-77-2621	福岡	☎092-624-0123

SBクリップ SBクリップアプリケーションータ

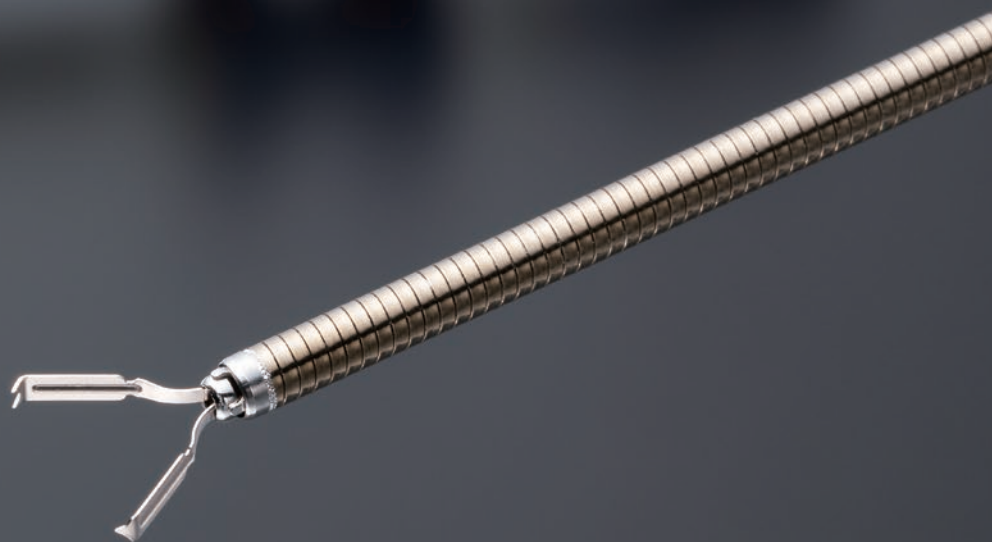

臨床での使い易さを
追求しました。

販売名：SBクリップ

医療機器承認番号：23000BZX00083000

販売名：SBクリップアプリケーションータ

医療機器届出番号：14B1X10030000020


SBクリップ／SBクリップアプリケーター

高い次元での基本性能に加え 開き直し機能、MRI対応を実現



開き直し機能


スライダを動かすことにより
クリップの開閉操作を繰り返すことが可能です。

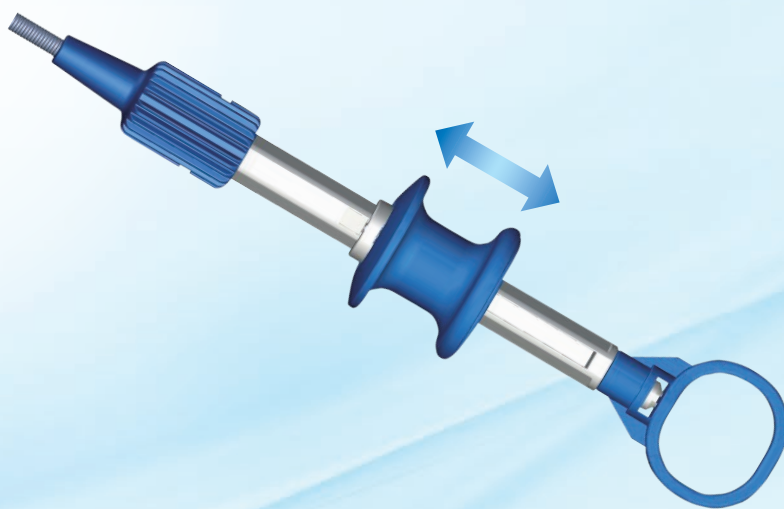


スピーディーな装填

スライダを押して引くだけの簡便操作でクリップの装填が可能です。
クリップ離脱後、アプリケーターには部品が残らないので
すぐに次のクリップの装填に移れます。

カートリッジ中央を
しっかりと把持

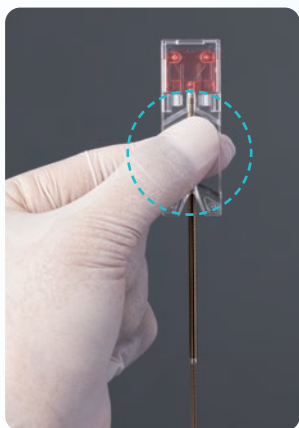


ハンドルを1往復させ装填完了

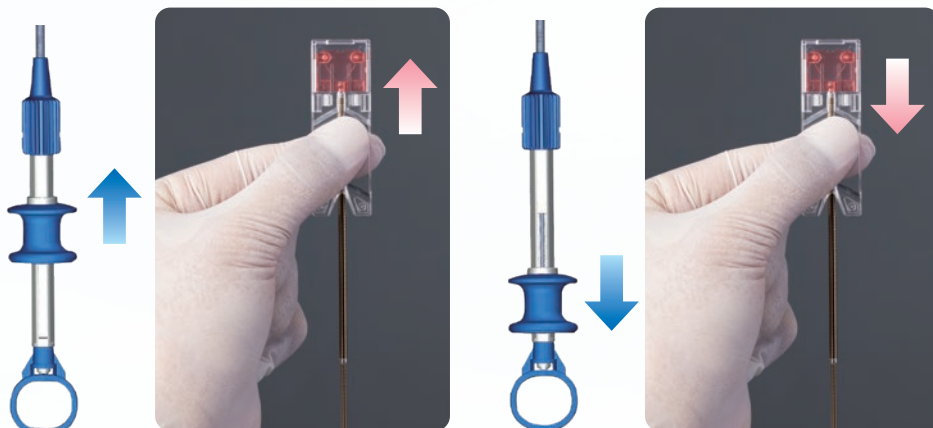

注意：把持する位置がずれていたり、しっかりと把持できていないと、装填不良が生じることがあります


簡便・直感的な操作性

アプリケーションからクリップを突出させる際、スライダを押す1アクションでクリップが最大幅まで開きます。

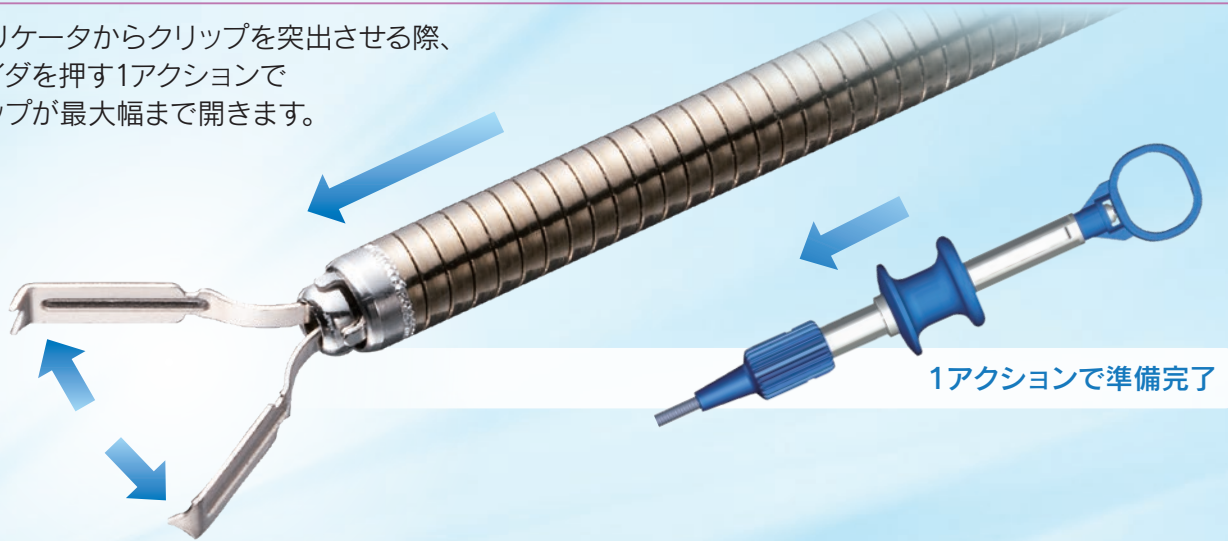

回転性能

回転操作部を回すことにより、自由な角度にクリップを回転させることが可能です。

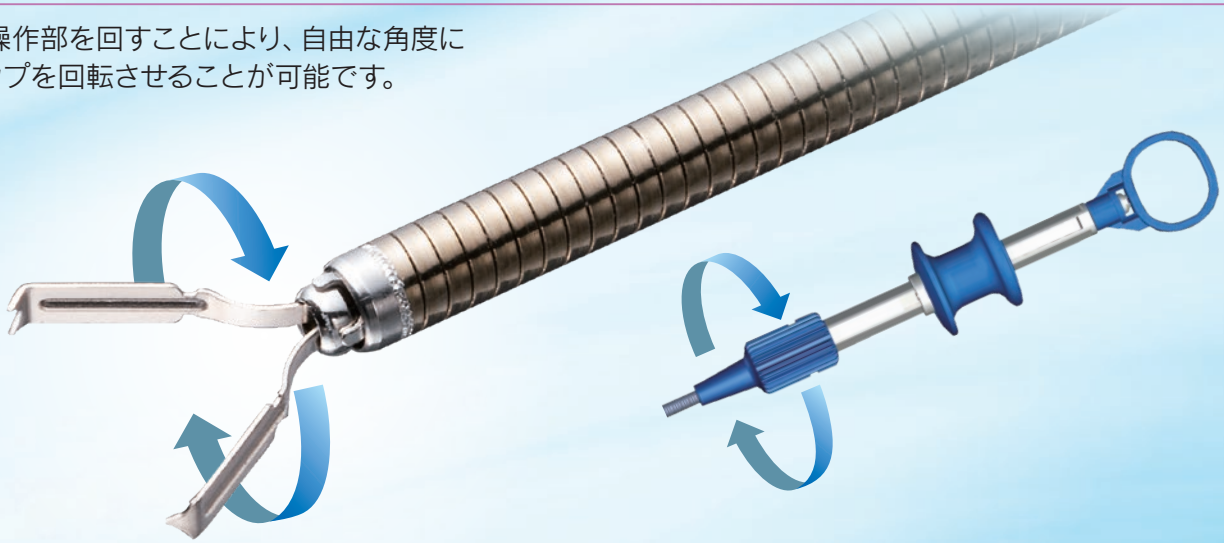

MRI対応

クリップはMRI検査に対応しています。

MR Conditional

非臨床試験において、クリップは条件付でMRIによる画像診断が可能であることを確認しています。本品を留置した患者は、以下の条件において安全にMRI検査を行うことが可能です。

- 静磁場: 1.5Tまたは3.0T
- 最大傾斜磁場: 580gauss/cm
- 全身平均比吸収率 (SAR) 2.0W/kgで15分間のスキャン