

モノポーラESDナイフ

SBナイフ


PAT.P



より安全なESDを目指して
より効率的なESDをサポートします


More Safely

先端形状と電極配置による安全性の向上

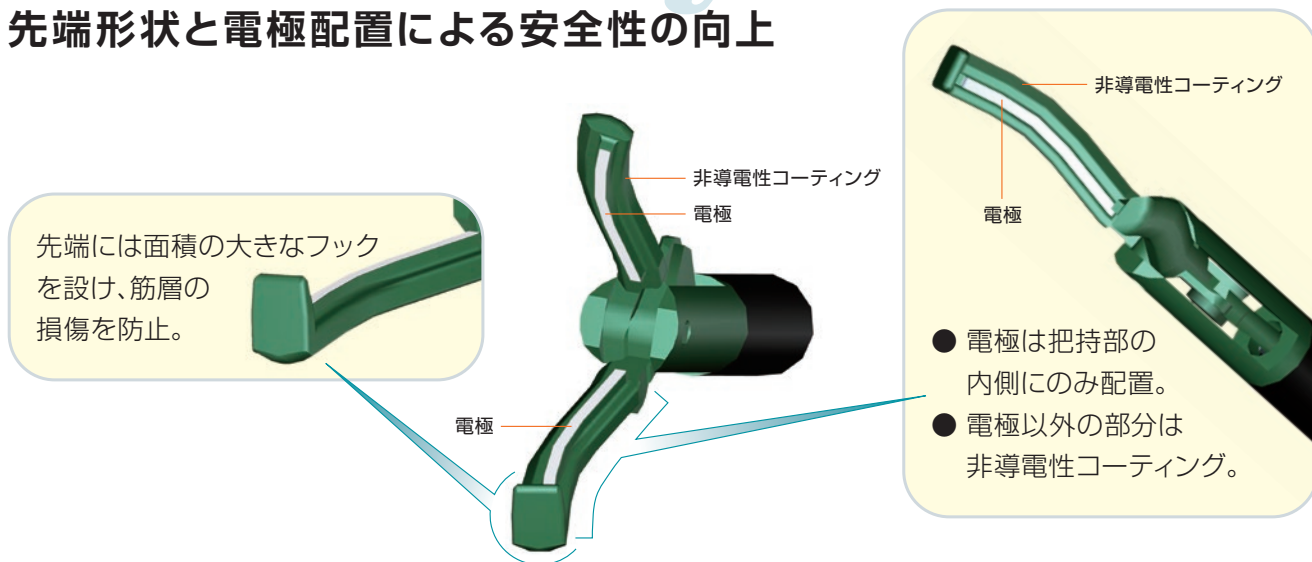

先端形状


把持部は先端がUPするようにカーブ付けし
先端が筋層に向かい難い安全設計

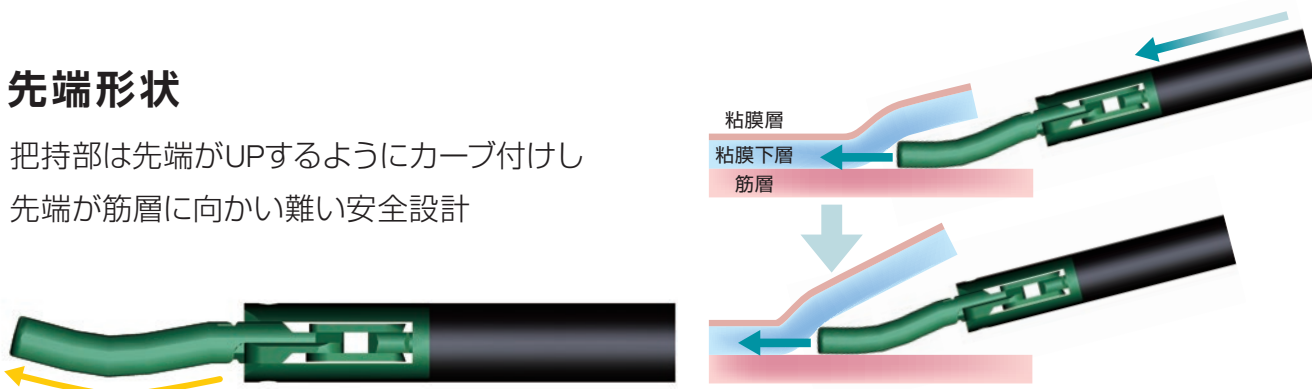

部位に応じたナイフの選択

内腔の狭い食道・大腸に適したショートタイプと、
胃で効率的に剥離が可能なスタンダードタイプとを取り揃えました。


スタンダードタイプ (胃)

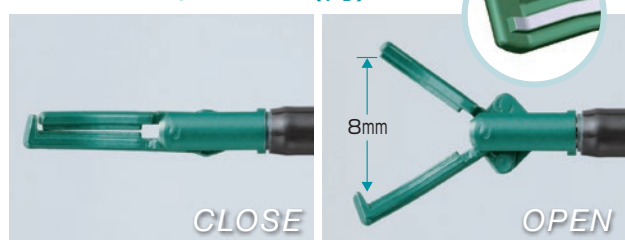

開き幅：8mm / フック内側電極：有り

把持時の先端の隙間をなくし、フック内側電極を設けることで血管が凝固してから切断され易い設計にしています。(出血防止)

ショートタイプ (食道など)

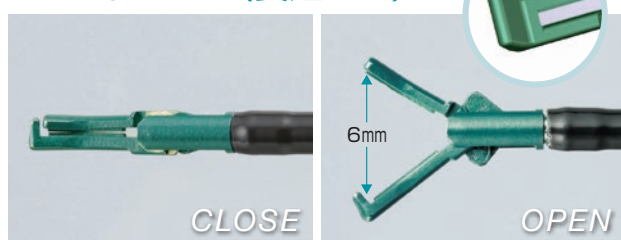


開き幅：6mm / フック内側電極：無し


把持時の先端に隙間を設け、フック内側電極をなくすることで万が一筋層を把持しても、ナイフを手前に引くことで筋層がリリースされやすい設計にしています。

操作性

把持部は左右180度回転可能で様々な状況下で組織に適合可能です。

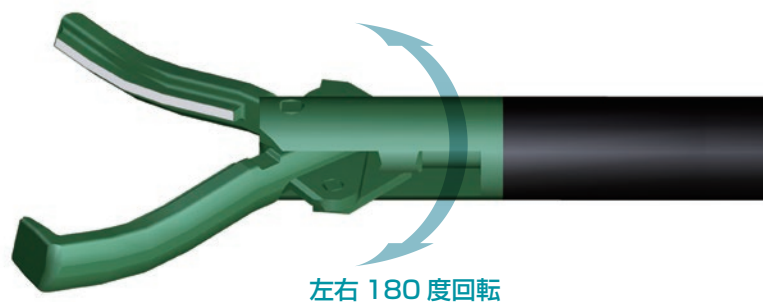

仕様

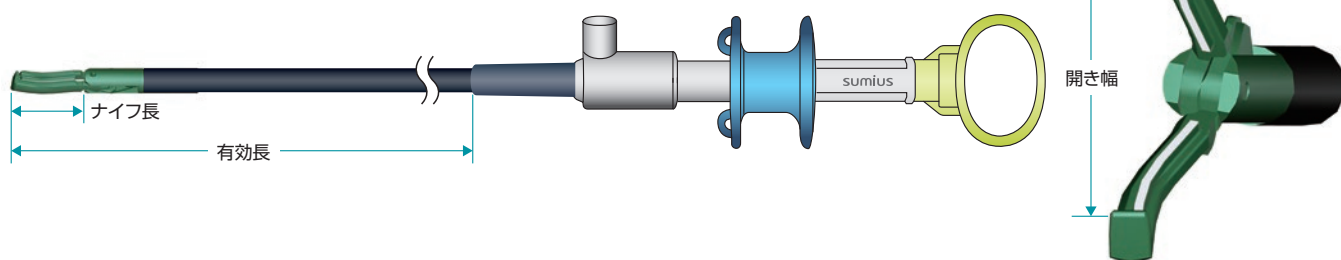

医療機器認証番号：221AABZX00044Z00

クラス分類Ⅱ

製品番号	タイプ	ナイフ長 (mm)	開き幅 (mm)	有効長 (m)	適応内視鏡チャンネル径 (mm)	フック内側電極	使用高周波出力方式	梱包単位	JAN コード
MD-47704	ショート	6	6	1.8	2.8 以上	なし	モノポーラ	1 本 / ケース	4545499055842
MD-47706	スタンダード	7	8			あり			4545499055859

【EOG 滅菌済】

- お願い
- ・本製品は本製品の適応以外の用途には使用しないでください。
 - ・本製品は、本製品の使用に熟練した医師、またはその管理下でご使用ください。
 - ・本製品の使用に際しては、電子添文をご確認の上ご使用ください。
 - ・本製品の製品ラベルにより、有効期限を確認してください。
 - ・有効期限切れのものは使用しないでください。
 - ・本製品は1回限りの使用で使い捨て、再度の使用は避けてください。
 - ・本製品の包装に破損、水濡れがあるものは汚染されている危険性がありますので、使用しないでください。
 - ・本製品は直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。
 - ・本製品に関して不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

※製品の規格・外観・その他を改良するために、予告なく仕様を変更することがあります。

【製造販売業者】

SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号

【お問い合わせ先電話番号】

東京 ☎03-5462-4824
 札幌 ☎0133-60-2400
 仙台 ☎022-742-2471
 北関東 ☎0495-77-2621
 大阪 ☎06-7659-2156
 名古屋 ☎052-726-8381
 広島 ☎082-542-1381
 福岡 ☎092-624-0123