

ESD用 ディスポーザブルフード

SBフード[®]

PAT.P




SBナイフをサポートする
“ESD用フード”

Support SB knife SB knife

ESDにおけるSBナイフをサポートします
(プロジェクショントップタイプ、プロジェクションボトムタイプ)

- ▶ 独特な開口部の形状によりSBナイフとの干渉を最低限にし、SBナイフの回転・開閉操作が可能です。
- ▶ 最大突出長12mmとし、SBナイフの操作スペースを確保します。

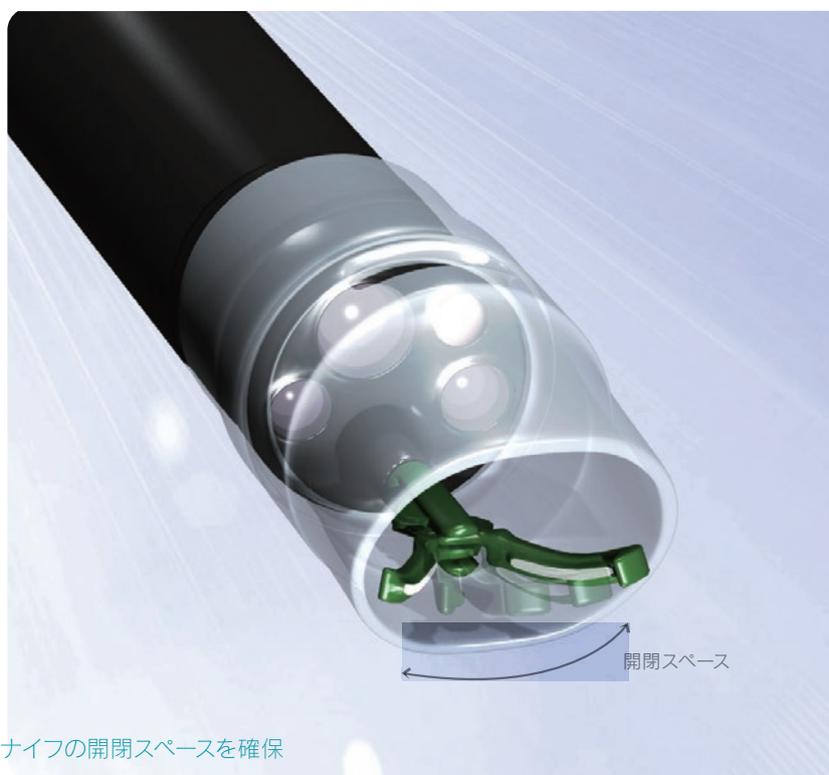

SBナイフの開閉スペースを確保



SBナイフの回転スペースを確保

- 大型の側孔を設け、フード内の流体(ガス、液体)の移動を促進し良好な視野確保が可能です。
- フード上面には傾斜を設け、粘膜下層への潜り込みが可能です。



PT



PB



Short



Features

▶▶ ショートタイプ (Short)

広い視野を確保します。



Short

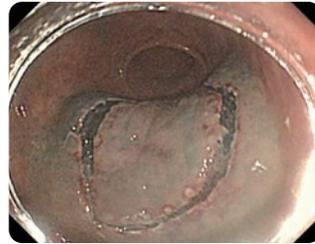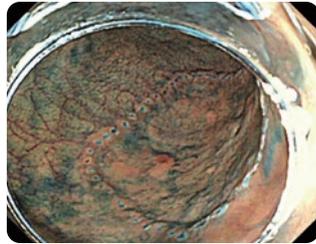


マーキング、粘膜切開、トリミングなど広い視野が必要な場面でご使用になれます。

▶▶ プロジェクション トップタイプ (PT)

剥離部にテンションをかけ、剥離が可能です。



PT

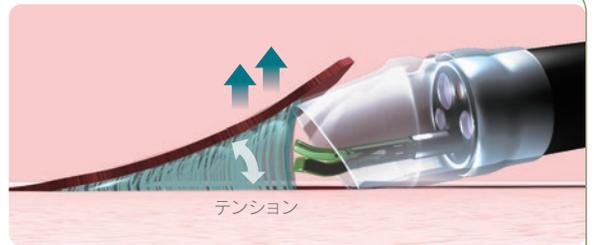


上面の傾斜と上側の12mmの突出長をいかし、粘膜を上方へ押し上げます。病変部が内視鏡画面で下側にある場合、剥離部に上方向のテンションをかけることができます。

▶▶ プロジェクション ボトムタイプ (PB)

剥離部にテンションをかけ、剥離が可能です。



PB

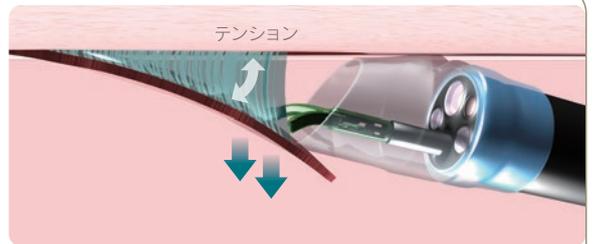

上面の傾斜と下側の12mmの突出長をいかし、粘膜を下方へ押し下げます。病変部が内視鏡画面で上側にある場合、剥離部に下方向のテンションをかけることができます。

How to Choice

各々の特徴を活かし、右表を参考に処置のステップ及び病変部の位置に応じて、ご使用ください。

処置のステップ	用途	使用するSBフードの種類	
		病変部が内視鏡画面で下側の場合	病変部が内視鏡画面で上側の場合
マーキング・粘膜切開・トリミング	広い視野を確保する	Short	
剥離序盤～粘膜下層への潜り込みまで	手前の粘膜を筋層側に押付け剥離部を内視鏡画面の中央に位置させる	PB	PT
粘膜下層への潜り込み時～終了まで	粘膜層を展開して剥離部にテンションを掛ける	PT	PB

仕 様

SBフード 3タイプ

写真左：ショート

中：プロジェクションボトム

右：プロジェクショントップ



販売名：SBフード 医療機器届出番号：14B1X10030000009

クラス分類 I

製品番号	タイプ	内視鏡先端からの最大突出長 (mm)	最大外径 (mm)	適用内視鏡外径 (mm)	内視鏡装着部カラー	梱包単位	JANコード
MD-47910	プロジェクショントップ (PT)	12	13	9.9	クリアー	12個/ケース	4545499056184
MD-47920	プロジェクションボトム (PB)	12	13	9.9	ブルー	12個/ケース	4545499056191
MD-47930	ショート	4	13	9.9	クリアー	12個/ケース	4545499056207
MD-47940	3タイプセット	—	13	9.9	—	12個/ケース	4545499056214

【EOG 滅菌済】

- お願い
- ・本製品は本製品の適応以外の用途には使用しないでください。
 - ・本製品は、本製品の使用に熟練した医師、またはその管理下でご使用ください。
 - ・本製品の使用に際しては、電子添文をご確認の上ご使用ください。
 - ・本製品の製品ラベルにより、有効期限を確認してください。
 - ・有効期限切れのものは使用しないでください。
 - ・本製品は1回限りの使用で使い捨て、再度の使用は避けてください。
 - ・本製品の包装に破損、水濡れがあるものは汚染されている危険性がありますので、使用しないでください。
 - ・本製品は直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。
 - ・本製品に関して不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

※製品の規格・外観・その他を改良するために、予告なく仕様を変更することがあります。

【製造販売業者】

SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号

【お問い合わせ先電話番号】

東京 ☎03-5462-4824

大阪 ☎06-7659-2156

札幌 ☎0133-60-2400

名古屋 ☎052-726-8381

仙台 ☎022-742-2471

広島 ☎082-542-1381

北関東 ☎0495-77-2621

福岡 ☎092-624-0123