

エンドセイバー®

Endosaber

ESD手技をトータルサポート

【監修】

市立四日市病院消化器内科 小林真 先生
大阪大学次世代内視鏡治療学 中島清一 先生



本品は大阪大学次世代内視鏡治療学(プロジェクトENGINE)の
開発基盤を活用して開発されたものです。

洗浄・吸引、色素散布、 マーキングから切開、剥離まで ESDに必要な処置をトータルサポート。

ボールチップとシース先端部を改良し、
使いやすさをさらに追求しました。


- 1本でESDにおける洗浄・吸引・色素散布・マーキング・切開・剥離を行えます。
- 大口径の管路により色素や生理食塩水の送液が可能です。
- 症例に合わせ4タイプから選択できます。

①先端ボールチップ形状 (キノコ型)

先端ボールチップを従来品の球状からキノコ形状に改良しました。

粘膜を引っ掛けながらの切開・剥離操作が行いやすくなりました。


先端ナイフ部長は、1.5mm、2.0mm、2.5mmの3種類をラインナップしています。

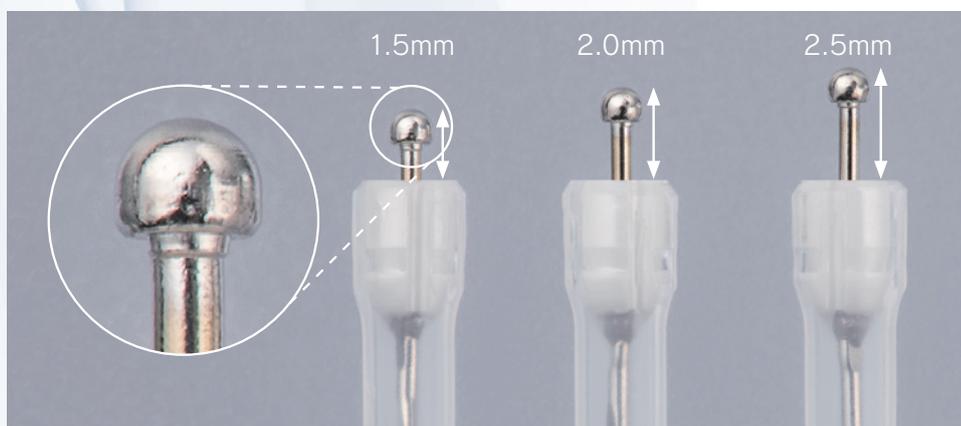

②細径シース


外径2.1mmの細径シースを採用し、内視鏡チャンネル部からの吸引への影響を低減します。

また、従来品よりもシース先端部の柔軟性が向上しており、内視鏡アングル箇所や鉗子チャンネル出口でのデバイスの引っ掛かりがより少なくなっています。

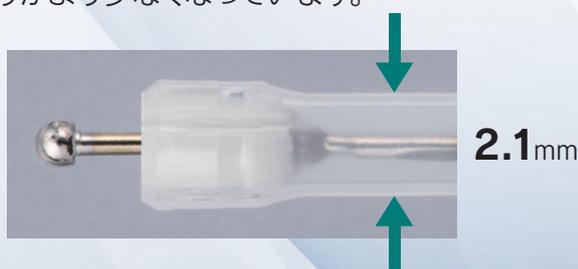

③送水可能

先端ノズルには4つの穴が空いており送水が可能です。病変部の洗浄やデバイス先端部の洗浄に有用です。

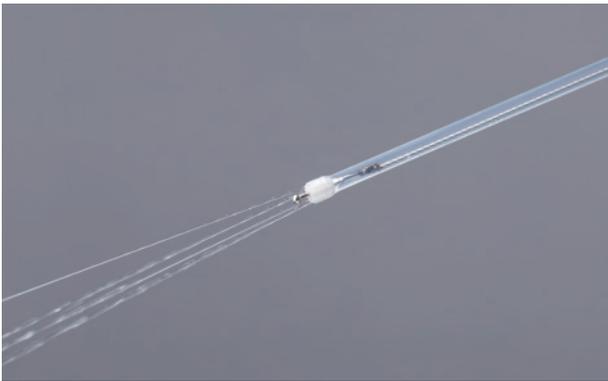

④固定式ナイフ

先端ナイフ部を固定式にすることで、ハンドル操作を廃して介助者の負担を軽減します。無駄を省いたシンプルな構造にすることで、コストを抑えた設計となっています。




エンドセイバー® Plus

先端ボールチップサイズを大型化した新たなラインナップ“エンドセイバー® Plus”が追加されました。(品番：MD-47762)

●先端ボールチップサイズ

従来品：1.0mm → “Plus”：1.6mm

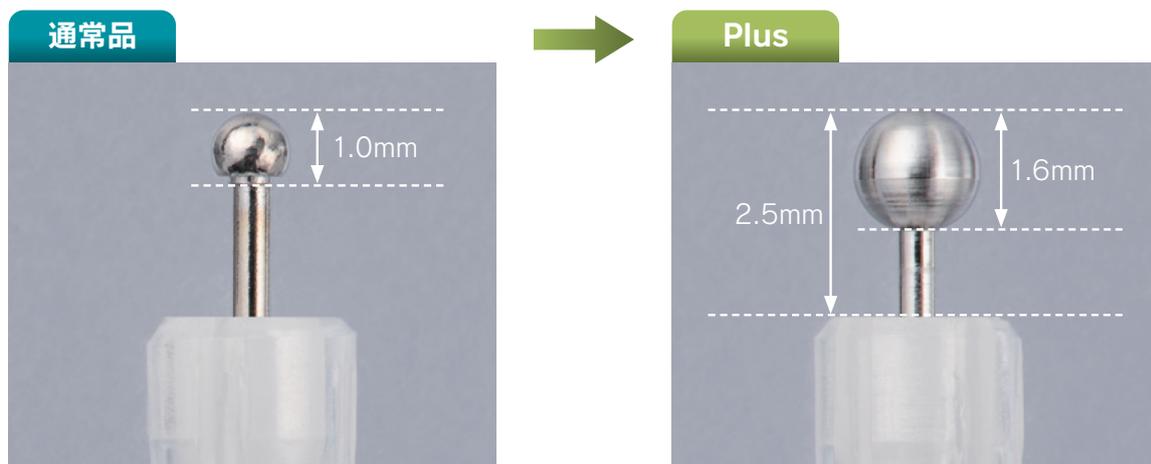

Plusの特徴

大型電極により、圧迫しながらの止血が可能となっています。また、切開・剥離時においても同様の圧迫効果により出血頻度が低減します。

<通常品との使い分け例>

- ・ Plus：胃ESD等で出血が多い症例
- ・ 通常品：胃・大腸・食道等のESD手技全般

仕様

販売名：ヤセック高周波処置具 医療機器認証番号：229AFBZX00045000 クラス分類Ⅱ

エンドセイバー®

品番	ナイフ部長 (mm)	電極径 (mm)	有効長 (mm)	挿入部最大外径 (mm)	適応鉗子口径 (mm)	梱包単位	JANコード
MD-47715	1.5	1.0	1980	2.75	2.8以上	3本／ケース	4580338970573
MD-47720	2.0	1.0					4580338970580
MD-47725	2.5	1.0					4580338970566
MD-47762	2.5	1.6					4580338970948

【EOG滅菌済】



MD-47715 MD-47720 MD-47725 MD-47762 (Plus)

Mother Lake 平成28年度滋賀県中小企業新技術開発プロジェクト補助金
チャレンジステージの研究成果を利用して開発されたものです。

- お願い
- ・本製品は本製品の目的用途以外の用途には使用しないでください。
 - ・本製品は、本製品の使用に熟練した医師、またはその管理下でご利用ください。
 - ・本製品の使用に際しては、電子添文をご確認の上ご利用ください。
 - ・本製品の製品ラベルにより、有効期限を確認してください。
有効期限切れのものは使用しないでください。
 - ・本製品は1回限りの使用で使い捨て、再度の使用は避けてください。
 - ・本製品の包装に破損、水濡れがあるものは汚染されている危険性がありますので、使用しないでください。
 - ・本製品は直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。
 - ・本製品に関して不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

※製品の規格・外観・その他を改良するために、予告なく仕様を変更することがあります。

【販売業者】

SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号

【お問い合わせ先電話番号】

東京 ☎03-5462-4824 大阪 ☎06-7659-2156
札幌 ☎0133-60-2400 名古屋 ☎052-726-8381
仙台 ☎022-742-2471 広島 ☎082-542-1381
北関東 ☎0495-77-2621 福岡 ☎092-624-0123

【製造販売業者】

gasec 山科精器株式会社

〒520-3001 滋賀県栗東市東坂525番地 ☎077(558)1173

sumiusは住友ベークライト株式会社の登録商標です

2022.3.0 L:AD477:JA:7:0:1804