

エンドセイバー®

Endosaber

ESD手技をトータルサポート

【監修】

市立四日市病院 消化器内科 小林真 先生
大阪大学 次世代内視鏡治療学 中島清一 先生



本品は大阪大学 次世代内視鏡治療学(プロジェクトENGINE)の
開発基盤を活用して開発されたものです。


洗浄・吸引、色素散布、 マーキングから切開、剥離まで ESDに必要な処置をトータルサポート。

先端ボールチップを改良し切開性能をさらに追求しました。

- ・1本でESDにおける洗浄・吸引・色素散布・マーキング・切開・剥離を行えます。
- ・大口径の管路により色素や生理食塩水の送液が可能です。
- ・症例に合わせ3タイプのラインナップをご用意しています。


①先端ボールチップ形状

- ・先端ボールチップを自社従来品から小型化することで切開性を追求。
粘膜を引っ掛けながらの切開・剥離操作が行いやすくなりました。
- ・先端ナイフ部長は1.5mm、2.0mm、2.5mmの3種類をラインナップしています。

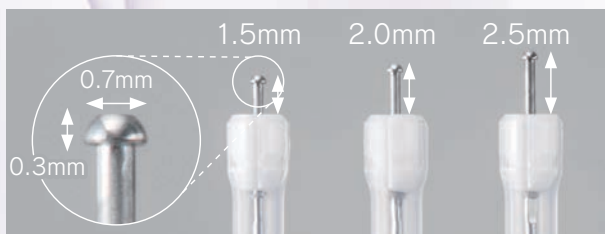

②細径シース

外径2.1mmの細径シースを採用し、内視鏡チャンネル部からの吸引への影響を低減します。また、シースを柔軟にしており、内視鏡アングル箇所や鉗子チャンネル出口でのデバイスの引っ掛かりを少なくしています。

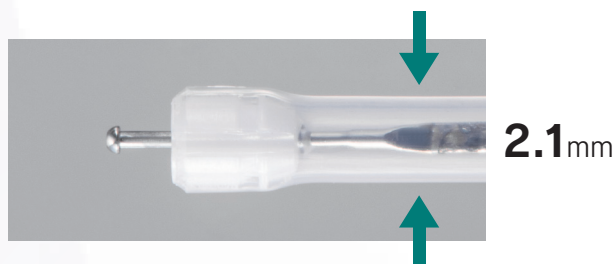

③送水可能

先端ノズルには4つの穴が空いており送水が可能です。病変部の洗浄やデバイス先端部の洗浄に有用です。



④固定式ナイフ

先端ナイフ部を固定式にすることで、ハンドル操作を廃して介助者の負担を軽減します。無駄を省いたシンプルな構造にすることで、コストを抑えた設計となっています。



エンドセイバー® Plus


・先端ボールチップサイズを1.6mmに大型化

大型電極により、圧迫しながらの止血が可能となっています。

また、切開・剥離時においても同様の圧迫効果により出血頻度の低減に期待ができます。

＜通常品との使い分け例＞

- ・Plus: 胃ESD等で出血が多い症例
- ・通常品: 胃・大腸・食道等のESD手技全般

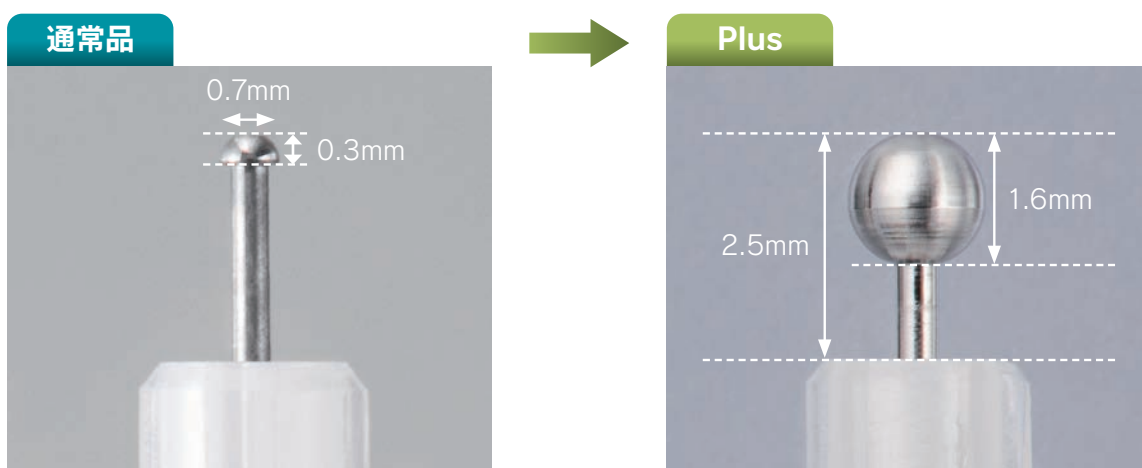

エンドセイバー® Fine

・細径シース


シース挿入部最大外径を1.95mmへ細径化。細径内視鏡に対応しました。手元部のシース径は1.5mmへさらに細径化。鉗子口からのスムーズな吸引をサポートします。

・ボールチップ形状

直径0.8mmのボールチップにより、スムーズな切開・剥離・止血操作をサポートします。

・内視鏡マーカー

シース先端に黒色マーカーを付与することにより、シース先端の視認性を向上させました。

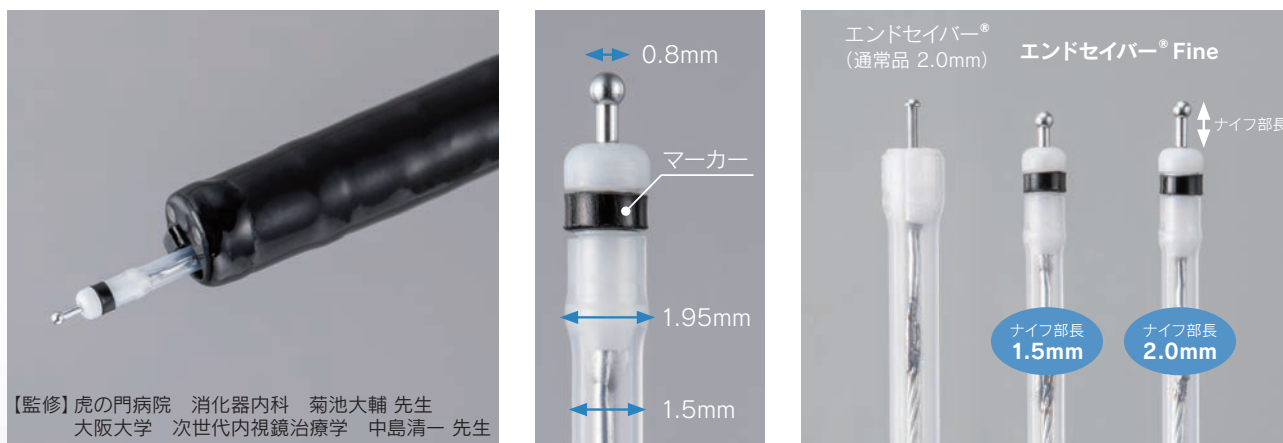

【監修】 虎の門病院 消化器内科 菊池大輔 先生
大阪大学 次世代内視鏡治療学 中島清一 先生

仕様

販売名：ヤセック高周波処置具 医療機器認証番号：229AFBZX00045000 クラス分類Ⅱ

エンドセイバー®


品番	ナイフ 部長 (mm)	電極径 (mm)	有効長 (mm)	挿入部 最大外径 (mm)	適応 鉗子口径 (mm)	梱包単位	JANコード
MD-47715	1.5	0.7	1980	2.75	2.8以上	3本／ ケース	4580338970573
MD-47720	2.0						4580338970580
MD-47725	2.5						4580338970566
MD-47762	2.5	1.6					4580338970948

【EOG滅菌済】

エンドセイバー® Fine

品番	ナイフ 部長 (mm)	電極径 (mm)	有効長 (mm)	挿入部 最大外径 (mm)	適応 鉗子口径 (mm)	梱包単位	JANコード
MD-47781	1.5	0.8	1888	1.95	2.0以上	3本／ ケース	4580338971075
MD-47782	2.0						4580338971082

【EOG滅菌済】

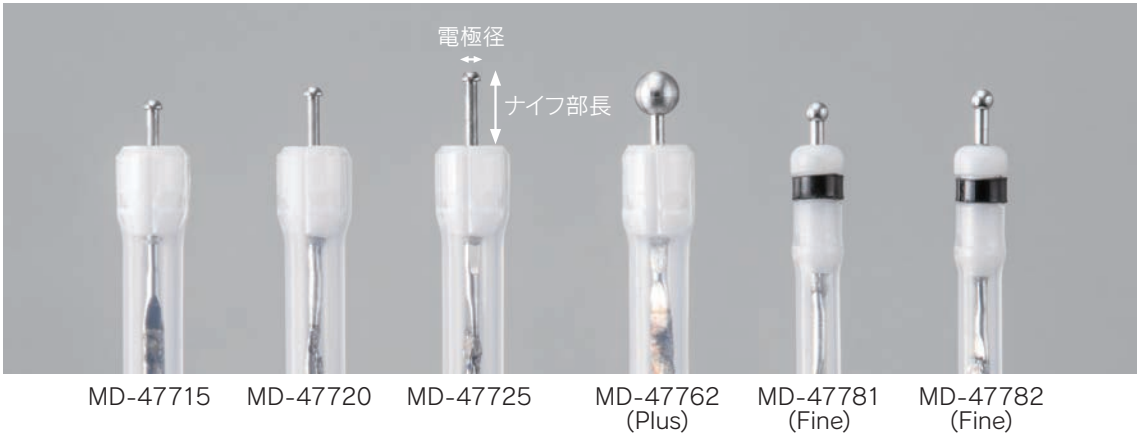

 平成28年度滋賀県中小企業新技術開発プロジェクト補助金
チャレンジステージの研究成果を利用して開発されたものです。

- お願い

 - ・本製品は本製品の目的用途以外の用途には使用しないでください。
 - ・本製品は、本製品の使用に熟練した医師、またはその管理下でご使用ください。
 - ・本製品の使用に際しては、電子添文をご確認の上ご使用ください。
 - ・本製品の製品ラベルにより、使用期限を確認してください。
 - ・使用期限切れのものは使用しないでください。
- ・本製品の再使用／再利用は避けてください。
 - ・本製品の包装に破損、水濡れがあるものは汚染されている危険性がありますので、使用しないでください。
 - ・本製品は直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。
 - ・本製品に関して不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

※製品の規格・外観・その他を改良するために、予告なく仕様を変更することがあります。

【販売業者】

SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号

【お問い合わせ先電話番号】

東京 ☎03-5462-4824
札幌 ☎0133-60-2400
仙台 ☎022-742-2471
北関東 ☎0495-77-2621
大阪 ☎06-7659-2156
名古屋 ☎052-726-8381
広島 ☎082-542-1381
福岡 ☎092-624-0123

【製造販売業者】

 山科精器株式会社

〒520-3001 滋賀県栗東市東坂525番地 ☎077(558)1173

sumiusは住友ベークライト株式会社の登録商標です

2023.5.1500 L:AD477:JA:7:O:1804